

主な仕様

	HV-F5000	HV-F5200
販売名	オムロン電気治療器 HV-F5000	オムロン電気治療器 HV-F5200
医療機器認証番号	220AGBZX00026000	220AGBZX00027000
一般的名称	家庭用低周波治療器	低周波・温熱組合せ家庭用医療機器
医療機器分類	管理医療機器	
使用目的/効能効果	肩こりの緩解、麻痺した筋肉の萎縮の予防及びマッサージ効果	低周波治療器として肩こりの緩解、麻痺した筋肉の萎縮の予防及びマッサージ効果、温熱治療器として電熱による温熱効果
使用電源	専用ACアダプタ (HV-F5000専用) 入力: AC100V (50/60Hz) 出力: DC12V/1A	専用ACアダプタ (HV-F5200専用) 入力: AC100V (50/60Hz) 出力: DC12V/2A
定格電流	500mA	電気治療: 500mA 温熱治療: 1300mA
発振周波数	約 1 ~ 1200Hz	
出力電流	20mA 以下 (無誘導抵抗負荷 1kΩ接続時の実効値)	
定格時間	15分	
使用環境温湿度	+10 ~ +40°C、30 ~ 85% RH	
保管環境温湿度	-20 ~ +60°C、10 ~ 95% RH	
対象腰周 (大型温熱サポーター)	100cm 以下	
本体質量	約 1200g	
本体寸法	幅約 178 × 高さ約 212 × 奥行き約 209mm	
付属品	患部集中パッド、専用ACアダプタ (HV-F5000専用)、パッドホルダー、取扱説明書 (品質保証書付き)、かんたん操作ガイド	患部集中パッド、専用ACアダプタ (HV-F5200専用)、パッドホルダー、大型温熱サポーター、取扱説明書 (品質保証書付き)、かんたん操作ガイド

	個装箱	サブカートン	マスターカートン	個装箱	サブカートン	マスターカートン
寸法 (幅×高さ×奥行き) 質量	250×236×205mm 約2.3kg	—	524×271×434mm 約10.1kg 4台/ケース	250×236×205mm 約2.3kg	—	524×271×434mm 約10.1kg 4台/ケース

※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。



⚠ 安全に関するご注意

下記のような医用電気機器との併用は、絶対しないでください。

- (1)ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器
 - (2)人工心肺などの生命維持用医用電気機器
 - (3)心電計などの装着型医用電気機器
- これら医用電気機器の誤動作をまねき、生命に著しい障害をもたらす原因になります。

オムロンなら、わからないことを気軽に相談できます。

修理・商品に関するお問い合わせ/別売品・消耗品のお求めは
オムロン お客様サービスセンター
※受付時間 (祝日を除く月～金) 9:00～19:00 ※都合によりお休みをいただいたり、受付時間帯を変更させていただくことがありますのでご了承ください。 ※ダイヤルは正確におかけください。

むろんオムロン
通話料無料 **0120-30-6606**
通信用料無料 **FAX 0120-10-1625**

お問い合わせ、ご用命は…

オムロン電気治療器 HV-F5200/HV-F5000




つらい症状、あきらめてませんか？

「治療院に行く暇がない」「治療代が気になる」
「今までの低周波治療器では、物足りない」
そんな理由で、つらい「こり」や「痛み」、あきらめていませんか。



オムロンが最新技術で、おこたえします。

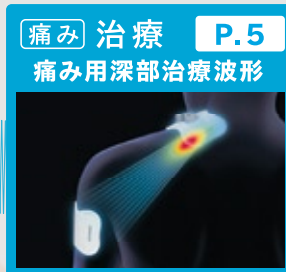

※写真・イラストはイメージです。

「こり」「痛み」症状別治療を1台で実現。
ご家庭でいつでも電気治療が
可能になりました。

オムロン電気治療器 HV-F5200

- こり 治療**
こり用マッサージ波形
- 痛み 治療**
痛み用深部治療波形
- 温熱 治療**
大型温熱サポーター

オープン価格




「こり」に広く、「痛み」に深く、 4枚パッドと症状に応じた専用波形で効率的に治療します。


こり 治療

こり用マッサージ波形が4枚パッドで
広範囲をもみほぐします。

- こりの原因となる筋肉疲労や血行不良の改善に有効な1~1200Hzの「こり用マッサージ波形」を採用。
- 4枚のパッドで治療波形を広く効率的に流すことで、筋肉の収縮・弛緩を促し血液の流れを改善します。

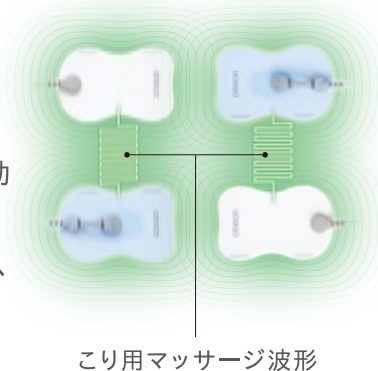

こり用マッサージ波形

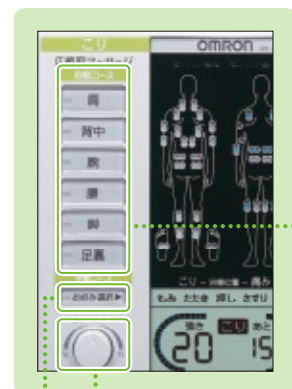

6つの部位に「こり自動コース」



お好み選択ボタン

「もみ」「たたき」「押し」「さすり」「振動」の5つからお好みの治療方法を選択できます。



強さバランスダイヤル


ダイヤルを左右にゆっくり回すと、治療中に左右の刺激の強さをお好みで変えることができます。




痛み 治療

痛み用深部治療波形を、
つらい患部に集中させます。


- 痛みをやわらげるのに有効な122Hzの波形とぴりぴり感が少ない4kHzの波形を組み合わせた「痛み用深部治療波形」を採用。
- 「患部集中パッド」を使用することで、患部の痛み治療波形を集中させることができます。

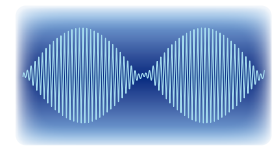

痛み用深部治療波形

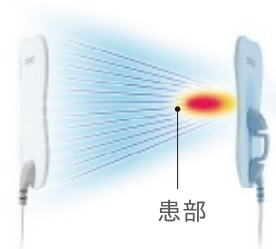

患部

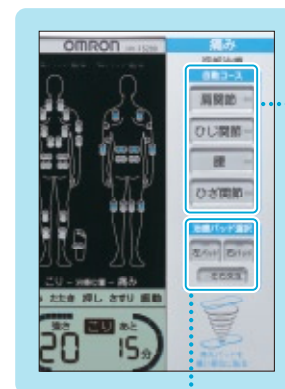


「患部集中パッド」




● 痛みのあるところに青い方のパッドを貼ります。

4つの部位に「痛み自動コース」

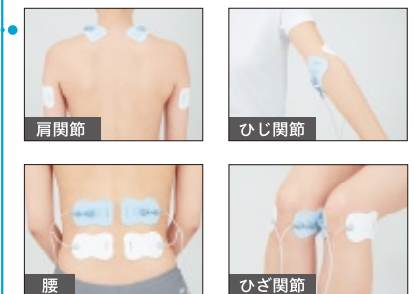

治療パッド選択ボタン

治療するパッドを「左のみ」「右のみ」「左右交互」の3つから選ぶことができます。パッドを4枚貼っている場合は、治療中に変更することもできます。

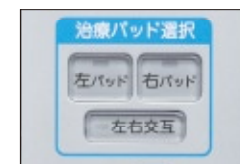

※左パッド2枚または右パッド2枚しか貼っていない場合、自動的に貼られている方のパッドで治療がおこなわれます。


大型温熱サポーターが
患部全体の血行を促進します。

温熱 治療

HV-F5200のみ

電気治療の前や後には、
肩・腰の広範囲を
包み込んで温める
温熱治療をおすすめします。

- 新開発の大型温熱サポーターが、患部の広範囲を包み込んで、効率的に温めます。広範囲を温めることで血行を改善し、つらい症状を緩和します。

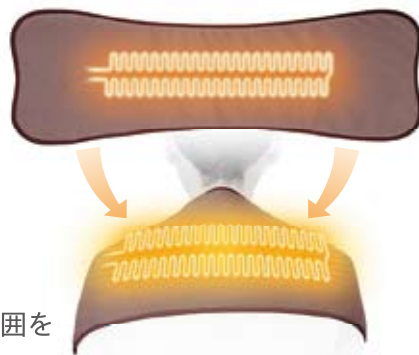

温熱ボタン

治療のめやす

時間：1カ所1回15分
回数：1日1~2回
温度：熱くない程度に

温度調整機能

ダイヤル操作で「低温」「中温」「高温」からお好みの温度に設定できます。



治療部位への使用例



巻きやすい大型温熱サポーター

付属の渡しベルトを調節することで、お好みの治療部位に簡単にフィットします。



使いやすさ、続けやすさにも
徹底的にこだわりました。

パッド貼り位置ガイド



部位ごとのパッド貼り付け位置を見やすく表示します。

約300回*使えるパッド

パッドは水洗いすることで、約300回繰り返し使えます。

※パッドの寿命は、肌の状態、保管状態などで短くなる場合があります。

替えパッド(別売品)



一般医療機器 | オムロン電気治療器用

患部集中パッド

HV-KSPAD [こり] 治療 [痛み] 治療 対応

医療機器届出番号 29B2X00003000025

1組2枚入り
メーカー希望小売価格
¥2,100(税込) [本体価格¥2,000]



電源ボタン



<HV-F5200>

治療開始ダイヤル (強さ調整「1」~「20」)

パッド収納ボックス



本体背面の大型ポケットには、4枚のパッドをすっきり収納できます。

コード巻取り収納



使い終わったら、すっきり収納できるパッドコード巻取り式。

※大型温熱サポーターの対象腰周：100 cm以下

※写真・イラストはイメージです。