

はじめにお読みください

スタートアップガイド

婦人用電子体温計 — MC-652LC 編 —



スマートフォン
で使える

専用アプリ「カラダのキモチ」に登録すると、
体温計の設定や測定記録の管理が簡単におこなえ、
さまざまな健康管理サービスを利用することができます。

5344821-0B
MC-652LC

専用アプリ「カラダのキモチ」について

オムロンの婦人用電子体温計をお買い上げいただき、ありがとうございました
この体温計は、専用アプリ「カラダのキモチ」に登録すると最大 40 日分の基礎体温データを記録します。
忙しい朝も測定するだけ。休日にゆっくりデータ転送と基礎体温リズムをチェックできます。
カラダの変化に気づいたらすぐ入力できるメモもあるので振り返りもできます。
排卵日、月経日予測もひと目でわかります。

- 専用アプリ「カラダのキモチ」への登録は、スマートフォンからおこなえます。
- スマートフォンの対応機種は次のサイトでご確認ください。

<https://wmhc.jp/kk/>



操作方法については、それぞれの取扱説明書をご参照ください。

- 専用アプリ「カラダのキモチ」へ転送されたデータはサーバーに保管されます。
(お使いのスマートフォンには保存されません。)
- Bluetooth® のワードマークは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、オムロンヘルスケア(株)は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
- iPhone は Apple Inc. の商標です。
iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- Android は Google Inc. の商標または登録商標です。
- 専用アプリ「カラダのキモチ」の仕様および本書に記載されている内容は、予告なしに変更することがあります。

■ 専用アプリ「カラダのキモチ」で設定できること

専用アプリ「カラダのキモチ」に登録すると次の項目の設定や変更ができます。

- ・アラーム …………… アラーム時刻、音量（大・中・小・OFF）の設定ができます。
アラームは約 1 分間鳴ります。収納ケースから取り出すと止まります。
- ・ブザー音 …………… 音量（大・中・小・OFF）の設定ができます。
ブザー音とは、測定終了時やデータ転送時の音のことです。
- ・バックライト ……… ON / OFF の設定ができます。

設定を変更するときは、専用アプリ「カラダのキモチ」で設定内容を変更してください。
また、体温計に変更内容を反映させるため、必ず転送してください。

ご使用上の注意事項

基礎体温のデータを記録するには、専用アプリ「カラダのキモチ」への登録が必要です。

スマートフォンで登録・転送する

登録する

Step
1

iPhone の方は **Bluetooth** を ON にする

Android スマートフォンの方は、Step2 から始めてください。

Step
2

次のサイトにアクセスし、
MC-652LC 用のアプリをインストールする

<https://wmhc.jp/kk/>

Step
3

専用アプリ「カラダのキモチ」を起動する

画面の指示にしたがってすすんでください。

Step
4

機器登録をする

設定メニューから「機器設定」を選択し、画面の指示にしたがって登録してください。

重要 スマートフォンを変更されたときは、再度登録が必要です。
Step1 から設定をやり直してください。



登録が完了したあとは、簡単に測定記録の転送がおこなえます。

データ転送する

Step 1

専用アプリ「カラダのキモチ」を起動する

Step 2

「データ転送」を選ぶ
次に、「グラフ」を選び、「体温を入力する」を押下する

画面の指示にしたがって、データ転送をしてください。

重要 iPhoneの場合
LEDランプ点滅（遅）中はデータ転送が可能です。
LEDランプ点滅（遅）していないときは、一度収納ケースから本体を取り出し、もう一度収納ケースに入れてください。

「通信」マークについて

が点滅／点灯したときは、すみやかに測定記録を転送してください。

点滅：32日分以上の測定記録があります。

点灯：40日分の測定記録があります。古い測定記録から順に削除されます。

すぐに測定記録を転送してください。

「通信」マーク

- ・専用アプリ「カラダのキモチ」にデータ転送をおこなったとき、正確な時間に合わせるために、時刻が補正されます。
- ・電池交換マーク 点灯中は転送できません。

◆ 転送状態一覧

	LED ランプ	音	機器の表示 *1
転送待機	点滅（遅 *2）	—	
転送中	点滅（速）	—	
転送完了	点灯	ピーピー！	
転送失敗 *3	点滅（速）	ピーピーピー！	

*1 収納ケースを外して転送すると、機器の表示が確認できます。
iPhoneの方は、データ転送時は収納ケースに入れているため機器の表示が確認できません。

*2 LEDの点滅間隔は内容により2種類のスピードがあります。
速…LED点滅間隔は0.5秒
遅…LED点滅間隔は1秒

*3 転送が失敗したときは、アプリの指示にしたがって、データ転送をやり直してください。

◆ Bluetooth通信を OFF にする方法

体温計の電池カバーを外し、ボタンを5秒間押してください。
Bluetooth通信をOFFにすると体温計の表示が図のように変わります。

重要 下記のような無線機器の使用が禁止された区域では、本体のBluetooth通信をOFFにしてください。
 ・航空機に乗るとき ・病院にいるとき ・日本国外にいるとき

iPhoneとの設定を解除したい場合もBluetooth通信をOFFにしてください。

Bluetooth通信をOFFにした後、もう一度ONにするためには、「登録する」のStep4から「機器登録をする」をおこなってください。

