

Q.	左右どちらの手首で測定すればいいですか？
A.	巻きやすい方の手首に巻いてください。ただし、左手首と右手首では、測定値が異なる場合がありますため、いつも同じ手首で測るようにしてください。
Q.	間違っって夜間測定モードに設定してしまいました。解除するにはどうすればいいですか？
A.	「夜間測定」ボタンを長押し（2秒以上）してください。
Q.	夜間測定モードになっているかどうかの確認方法はありますか？
A.	「測定/停止」ボタン、「夜間測定」ボタン、「記録」ボタンのいずれかを短押しして、「夜間測定」ボタンに緑色のランプがつけば、夜間測定モードがONになっていることを確認できます。 （※注意：「夜間測定」ボタンを長押しすると解除されます）
Q.	夜間測定モード中に測定結果を見ることはできますか？
A.	夜間測定モード中は、測定結果を見ることはできません。測定結果を見る場合は、夜間測定モードを解除（「夜間測定」ボタンを長押し）してください。
Q.	起床時に夜間測定モードを解除する必要はありますか？
A.	夜間測定モードをONにされますと、設定した時刻の測定が完了すると、自動的に夜間測定モードは解除されますので、ご自身で解除する必要はありません。
Q.	充電式の電池を使うことはできますか？
A.	電源は単4形アルカリ乾電池のみご使用ください。