

除細動パッドパックの装着確認方法

① キャリングケースから本体を取り出す



② 除細動パッドパックを装着されている状態のまま押し込む




本体上部を抑え、除細動パッドパックを2本の指で強く押し込んでください。

③ 除細動パッドパックの左右（両方）のツメがロックされていることを確認する



本体の側面から左右（両方）のツメのロックを確認してください。

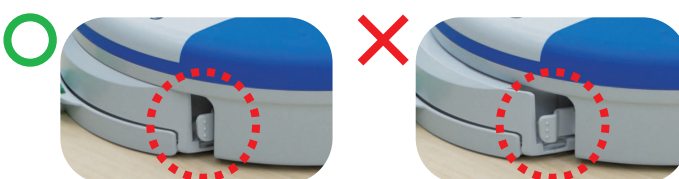

左右（両方）のツメがロックされていなかった場合は、上記②からやり直してください。

左右（両方）のツメの位置

④ スタンバイ表示を確認し、キャリングケースに戻す



スタンバイ表示が緑色に点滅していることを確認し、キャリングケースに戻してください。

※対象製品：自動体外式除細動器 (HDF-3500)
除細動パッドパック (HDF-PD-3150)
未就学児専用除細動パッドパック (HDF-PD-3350)



動画で確認!

※本記載の確認方法は除細動パッドパックの装着確認方法のみに関するご案内です。日頃の日常点検、および定期点検に関しては、必ずAED本体に同梱されているご案内、あるいは下記弊社ホームページからダウンロードできる点検方法に従ってください。

<https://www.aed.omron.co.jp/for-installed-customer/daily-check.html>

お問い合わせ

オムロンヘルスケア株式会社 TEL 0120-401-066

住所：〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地

URL：<https://www.aed.omron.co.jp/>