

オムロン 自動体外式除細動器 レスキューハート HDF-3500

自主回収対象製品のお客様へのお願い

自主回収理由の事象の発生はごく稀ではありますが、代替品の準備が整うまでは、以下の2点のご対応をお願いいたします。


1) 毎日 : 「スタンバイ表示」の確認

日常点検としてお願いしている内容ではありますが、
「スタンバイ表示」が緑色に点滅していることを毎日ご確認ください。

点検いただいた際、以下のような状態の場合は、弊社までご連絡ください。

- a. : 「スタンバイ表示」に何も表示されていない場合
- b. : 「スタンバイ表示」が赤色に点滅している場合、
またはビープ音が連続して聞こえている場合

- ・対象製品は、購入され最初に箱から取り出した直後に自動でセルフテストが実施されます。
そのセルフテストで対象製品に本事象発生の原因となる不具合があると検知された場合、
上記a のとおり通知されます。
- ・毎日自動的に実施されるセルフテストによって対象製品に本事象発生の原因となる不具合があると検知された場合、上記b のとおり通知されます。

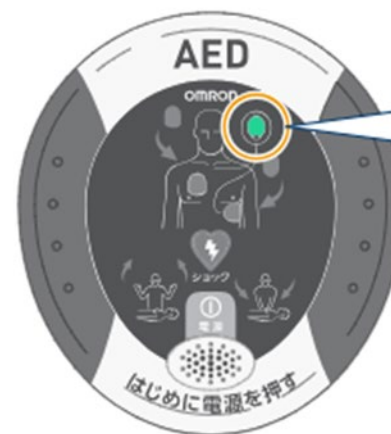

スタンバイ表示が緑色に点滅していることを確認してください。

⚠ 注意

電源ボタンは押さず目視でご確認ください。
毎回電源ボタンを押すと、バッテリー寿命が短くなったり、「メモリーがいっぱいです」の音声ガイドが流れたりする場合があります。

2) 緊急時 : AED 使用時の対応

「スタンバイ表示」が緑色に点滅していれば、推奨通りご使用ください。

万一、救命使用時に電気ショックができない場合は、救急隊が到着するまで心肺蘇生を継続してください。