


リストカバー

HEM-WRCV01

取扱説明書

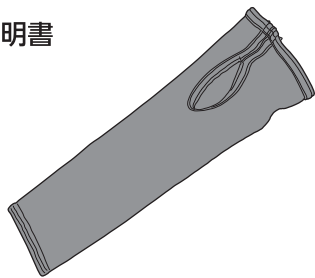

このたびは、オムロン製品をお買い上げいただきありがとうございました。

- ・本製品はオムロン 手首式血圧計 HEM-9600 シリーズで夜間に血圧を測定するときに使用します。血圧計のカフを手首に巻く前に腕にはめることでカフの汚れを防ぎます。
- ・安全にお使いいただくため、取扱説明書を必ずお読みください。
- ・本書は、いつもお手元においてご使用ください。

3149347-6 A

安全上のご注意

- お使いになる前に必ずお読みください。
- ここに示した内容は、製品を安全に正しくご使用いただき、使用者や他の人々への危害、財産への損害を事前に防止するためのものです。

注意について

▲注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う、または物的損害*の発生が想定されます。





※物的損害とは、家屋や家財および家畜やペットに関わる拡大損害を示します。

▲注意

- ・リストカバーを手首にはめたとき、しわのついた状態でカフを巻かない。
- ・本製品以外のリストカバーを使用しない。
▶正しく測定できないことがあります。
- ・リストカバーは複数人で使用しない。
▶リストカバーが伸びてしわが付きやすくなり、正しく測定できない原因になります。
- ・医療機関や公共の場所などにおいて不特定多数で使用しない。
▶傷病の発生の原因になります。
- ・次の場合は、医師の指導のもとでご使用ください。
- 使用中に皮膚炎など肌の異常を感じる場合
▶傷害を負う原因になります。

リストカバーの使いかた

夜間測定時、下図のように最初にはめてから血圧計のカフを手首に巻いてください。（右手首にはめるときも同様です）カフの巻き方については、血圧計の取扱説明書をお読みください。

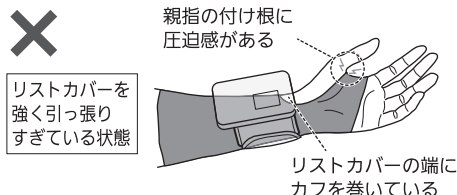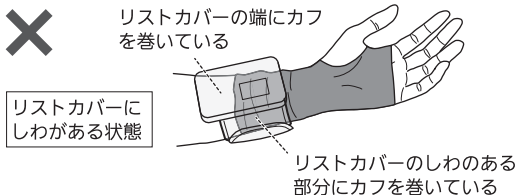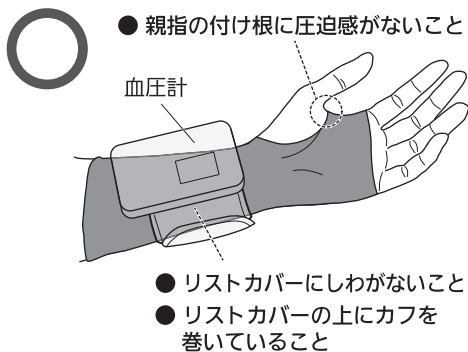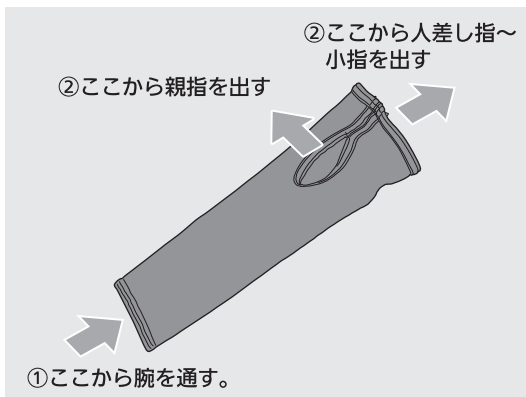

お手入れ

- リストカバーは週 1 回程度洗濯することをお勧めします。
- リストカバー（材質〈構成比率〉：ナイロン〈90%〉、ポリウレタン〈10%〉）を洗濯するときは、薄めた中性洗剤で手洗いし、自然乾燥させてください。洗濯機、乾燥機は使用しないでください。また、殺菌・消毒剤、柔軟剤は使用しないでください。

仕様

販売名	リストカバー HEM-WRCV01
販売商品コード	HEM-WRCV01
耐用期間	30 回洗濯もしくは 6 カ月のいずれか早く到達した方
使用環境条件	+ 10 ~ + 40 ℃ / 15 ~ 90%RH（結露なきこと） / 800 ~ 1060 hPa
保管／輸送環境条件	- 20 ~ + 60 ℃ / 10 ~ 90%RH（結露なきこと）
質量	約 7.5 g
寸法	約 160（袖口側の周囲）× 200（高さ）mm
材質	構成比率：ナイロン（90%） ポリウレタン（10%）
発売元	オムロン ヘルスケア株式会社 〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪 53 番地

製品のお問い合わせ、別売品や消耗品のご注文、修理のご依頼は

オムロン ヘルスケア お客様サポート

<https://www.healthcare.omron.co.jp/support/>

オムロン お客様サービスセンター

TEL 0120-30-6606（通話料無料） 受付時間 9:00～17:00（祝日を除く月～金）

〒515-8503 三重県松阪市久保町1855-370

※ 都合により、お休みや受付時間の変更を
させていただきます場合があります。

