

■ Heartnote[®] サービス利用価格

新型レポート(ECG Station)	最大7日間
解析レポートのみ	13,500円
医師コメント付き	15,500円

■ 保険点数

Heartnote[®] によるホルター心電図検査は、
保険収載済み検査です。

D210	ホルター型心電図検査	1, 30分、または その端数を増すごとに	90点
		2, 8時間を超えた場合	1,750点

■ 主な仕様

記録方式	デジタルメモリ方式
記録周波数	心電波形:256Hz / 3軸加速度:32Hz
作動(運転)モード	連続作動機器
電源	リチウムポリマー二次電池
連続使用可能時間	167時間
耐用年数	3年[自己認証(当社データ)による]
使用環境温湿度	温度範囲:10~45℃ 湿度範囲:10~95% RH(結露なきこと)
電極(装着部)の 最高温度	48℃(JIS T 60601-2-47に従い、試験環境45℃にて 測定した値)
保管環境温湿度	温度範囲:1~45℃ 湿度範囲:10~95% RH(結露なきこと)
液体の浸入に 対する保護	IPX4/IPX7
付属品	粘着剤、ドレッシングフィルム、クリーンポリバッグ、 返却用台紙、サービス依頼書 兼 同意書、行動記録 表(同意説明文書)、返送用封筒、 取扱説明書(医療従事者向け)、 安全にお使い頂くために(患者様向け)

※本製品には使用期限があります。
製品パッケージの使用開始期限内にご使用下さい。
なお、使用期限が切れた場合の送料は、
医療機関様のご負担となることをご了承ください。

OMRON

電極一体型ホルター心電計

Heartnote

ホルター心電図検査サービス

薄く、小さく、しなやかに。
検査の負担を、ここまで軽くしました。



お問い合わせ先

TEL:050-1800-5809(24時間受付365日対応)
mail : info-heartnote@omron.com

OMRON

製造販売元 オムロン ヘルスケア株式会社

類別:管理医療機器(クラスII) 特定保守管理医療機器
一般的名称:長時間心電用データレコーダ
販売名 心電記録器 Heartnote
型式 J-HN-E2
医療機器認証番号 302ACBZX00015000

世界最薄・最軽量クラス*のコンパクトサイズ。 ホルター心電計の常識を覆します。

*2023年8月1日現在

電極一体型ホルター心電計 Heartnote®

30mm×100mm、
薄さ5mm、
重量わずか13g。

ホルター心電計をコンパクトサイズに凝縮しました。
取り扱いも容易で、装着しても普段と変わらない
生活が送れます。

電極剥がれ確認機能を搭載

起動後に電源スイッチを押すことで、LEDの色から貼り付け状態が確認できます。密着が不十分で心電データが読み取れない心配を防ぎます。



● 緑色に点灯

OKです。皮膚に密着しています。




● 青色に点灯

皮膚に密着していないので心電データが読み取れません。
皮膚に密着するよう上から軽く押し当ててください。

防水性能 IPX4/IPX7 対応で、 半身浴も OK

装着したままシャワーや半身浴が可能です。
夏場に入浴できない不快感もありません。

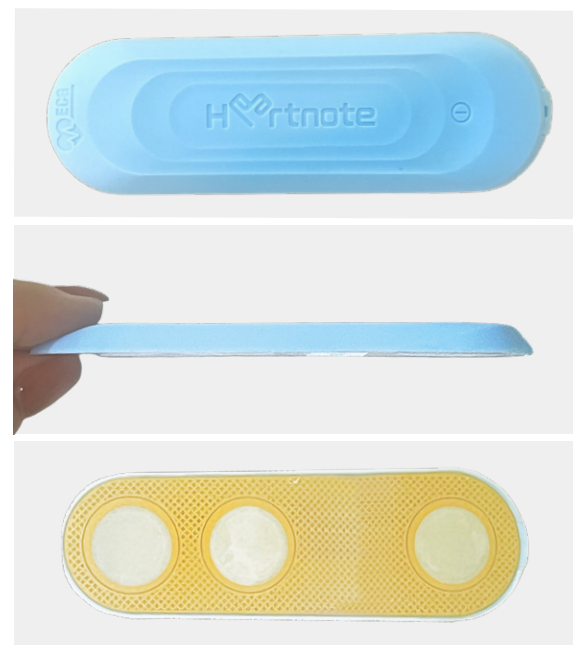

貼り付け時の上下確認ができるケアマーク

ケアマークがついている方が上側になります。貼り付ける際の上下確認が容易に行えます。



ケアマーク

上下方向を示すマークです。
使用時はこのマークが上側になります。

電源スイッチ

起動および作動確認
に使用します。

機器のご利用から解析までを手軽に。 新しいホルター心電図検査サービス。

サービス内容

Heartnote® を利用したホルター心電図検査サービスがご利用いただけます。
取扱いは容易で、解析結果（レポート）は専用の Web サイトで確認可能です。

