

脚の疲れに、温マッサージ。

# Air Massager

オムロン エアマッサージャ



DB(ディーブブラウン)



WR(ワインレッド)

オムロン エアマッサージャ

HM-260-DB(ディーブブラウン) / WR(ワインレッド)

※あたため機能による温熱治療効果はありません。

## 主な仕様 ※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

●販売名…オムロン エアマッサージャ HM-260シリーズ ●商品型式名…HM-260-DB/HM-260-WR ●メーカー希望小売価格…オープン価格  
 ●一般的名称…家庭用エアマッサージ器 ●医療機器分類…管理医療機器 ●使用目的又は効果…あんま、マッサージの代用として、一般家庭で使用する。疲労回復・血行を良くする・筋肉の疲れを取る・筋肉のこりをほぐす・神経痛、筋肉痛の痛みの緩解(かんかい) ●定格電源…AC100V 50/60Hz ●定格入力…30W(ヒーター部8W 含む) ●本体質量…約1.7kg(ACアダプタ含まず) ●外形寸法…幅約610×高さ約550×奥行き約60mm(本体カバーあり) ●対象足サイズ…20~27cm ●対象ふくらはぎ周…30~43cm ●付属品…専用ACアダプタ、本体カバー(本体装着済み)、足裏用アタッチメント、収納バッグ、取扱説明書(品質保証書付き) ●別売品…本体カバーセット、専用ACアダプタ、足裏用アタッチメント、収納バッグ ●医療機器認証番号…227AABZX00073000 ●パッケージ寸法(質量)：幅約300×高さ約345×奥行き約180mm(約2.46kg)

## △ 使用上のご注意

●医師からマッサージを禁じられている人は使用しないでください。例：血栓(塞栓)症、重度の動脈リゅう(瘤)、急性静脈リゅう(瘤)、各種皮膚炎、皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など◎事故や体調不良の原因になります。

●下記のような医用電気機器との併用は、絶対しないでください。

(1)ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器 (2)人工心臓などの生命維持用医用電気機器 (3)心電計などの装着型医用電気機器  
 ◎これら医用電気機器の誤作動をまねき、生命に著しい障害をもたらす原因になります。

●次の人は医師と相談してご使用ください / 悪性腫瘍のある人 / 心臓に障害のある人 / 温度感覚喪失が認められる人 / 妊娠初期の不安定期または出産直後の人 / 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 / 皮膚に創傷のある人 / 安静を必要とする人 / 体温38℃以上(有熱期)の人 例)急性炎症症状(倦怠感、悪寒、血圧変動など)の強い時期や衰弱しているとき / 骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなどの急性(疼痛性)疾患の人 / 医師の治療を受けている人や、特に身体に異常を感じている人 / かつて治療を受けたところまたは疾患部へ使用する人 / 体力の衰えた人 / 重度の血行障害や血液疾患のある人 / 腱鞘炎の人

◎事故や体調不良の原因になります。◎圧迫により一時的に内出血が発生することがあります。

●足以外には使用しないでください。◎事故や体調不良の原因になります。

●分解や修理、改造をしないでください。◎発火したり、故障や事故の原因になります。

DB(ディーブブラウン)



4 975479 408694

WR(ワインレッド)



4 975479 408700

お問い合わせ、ご用命は…

オムロンなら、わからないことを気軽に相談できます。

修理・製品に関するお問い合わせ / 別売品・消耗品のお求めは **TEL 0120-30-6606** FAX **0120-10-1625**  
※受付時間(祝日を除く月~金) 9:00~19:00 ※都合によりお休みをいただいたり、受付時間帯を変更させていただくことがありますのでご了承ください。 ※ダイヤルは正確におかけください。

製造販売元 **オムロンヘルスケア株式会社** 〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地 <http://www.healthcare.omron.co.jp/>

DA265 ①UM M15B

©OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 2015. All Rights Reserved.

# OMRON



オムロン エアマッサージャ

HM-260-DB / WR

All for Healthcare

ふくらはぎから足先まで、  
温めながら  
全体をマッサージ。



※ヒーターで足先を温めます。

もみほぐし・しぼりあげのモード切替。



モードボタン

押す

1 もみほぐし

足首→ふくらはぎ→足先の順に  
加圧し、一気に空気を抜くことで、  
足全体をもみほぐします。



押す

2 しぼりあげ

足先・足首・ふくらはぎを  
順番に加圧し、  
足全体をしぼりあげます。



押す

3 もみほぐし(ふくらはぎ)

足首→ふくらはぎの順に加圧し、  
一気に空気を抜くことで、  
ふくらはぎを中心に、  
もみほぐします。



足裏用アタッチメント

突起が心地よく足裏を刺激します。

ヒーター付きで足先あたたか。

足先あたたため機能

足先をすっぽりつむフード付き。  
ヒーターとフードで足先を  
あたためながら  
マッサージ。



対象足サイズ

20~27cm

対象ふくらはぎ周

30~43cm

あたため

あたため  
ボタン



本体カバーセット(別売)

メーカー希望小売価格 3,500円(税別)

本体カバーは、洗濯できるからいつでも清潔



●DB(ディープブラウン)  
型式:HM-260-COVDB

●WR(ワインレッド)  
型式:HM-260-COVWR