



オムロン MC-681が
解決します!



抗菌樹脂
使用

オムロン 電子体温計 MC-681
メーカー希望小売価格 ¥2,625(税込)
けんおんくん 予測・実測 わき専用

本体質量：約18g(電池含む)
外形寸法：幅30×長さ110×厚さ14mm
医療機器認証番号：225ACBZX00050000 管理医療機器

仕様 ※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

●販売名…オムロン 電子体温計 MC-681 ●一般的名称…電子体温計 ●医療機器分類…管理医療機器 ●使用目的、効果又は効果…測温部を部位に接触させて、腋窩の体温を測定し、最高温度を保持しデジタル表示すること。●電源電圧…DC3V(リチウム電池CR2016×1個) ●消費電力…0.01W ●電池寿命…約15000回(予測検温) 約3000回(実測検温) ●感温部…サーミスタ ●体温表示…3桁+℃表示、0.1℃毎 ●測定精度…±0.1℃(標準室温23℃にて恒温水槽で実測測定した場合) ●測定範囲…32.0~42.0℃ ●使用環境温湿度…周囲温度：+10~+40℃、相対湿度：30~85%RH ●質量…約18g(電池含む) ●外形寸法…幅30×長さ110×厚さ14mm ●付属品…お試し用電池(リチウム電池CR2016×1個)、収納ケース、取扱説明書(医療機器添付文書・品質保証書付き)、EMC技術資料 ●医療機器認証番号…225ACBZX00050000

	個装箱	サブカートン	マスターカートン
寸法(幅×高さ×奥行き)	72×187×44mm (約64g)	266×191×90mm (約467g) 5台/ケース	550×231×473mm (約5.7kg) 50台/ケース
質量			



4 975479 425707

▲安全に関するご注意

- 検温結果の自己診断や治療はしないでください。病状の悪化につながる場合があります。治療は医師の指導に従ってください。
 - 人の検温以外に使用しないでください。
 - 本製品はわき専用の体温計です。わき以外(耳や口中など)で検温しないでください。耳などを傷つける恐れがあります。
 - 乳幼児の手の届かないところに保管してください。また、お子様だけのご使用はさせていただきます。
- ※ご使用前に取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。

お問い合わせ、ご用命は…

オムロンなら、わからないことを気軽に相談できます。

修理・商品に関するお問い合わせ/別売品・消耗部品のお求めは
オムロン お客様サービスセンター
※受付時間(祝日を除く月~金)9:00~19:00 ※都合によりお休みをいただいたり、受付時間帯を変更させていただくことがありますのでご了承ください。※ダイヤルは正確におかけください。

通話料無料



通話料無料



0120-30-6606

0120-10-1625

製造販売元 **オムロンヘルスケア株式会社**

〒617-0002 京都府向日市寺戸町9-1 坪53番地 <http://www.healthcare.omron.co.jp/>

DA247 ①XM ②M138

©OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 2013. All Rights Reserved.

OMRON



わき専用
予測・実測

前回値
メモリ

オート
パワーオフ

電池
交換可能

お知らせ
ブザー付き

収納
ケース付き

はさみやすい
フラット
感温部



20
秒
予測検温(平均)

オムロン
電子体温計 MC-681



けんおんくん

All for Healthcare

ご家族みんなの
検温時の悩み・・・

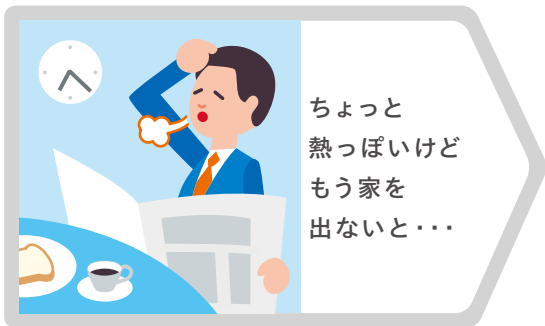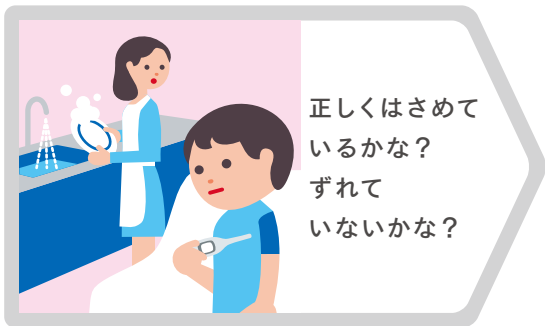

オムロンの最新技術で
ご家族みんなの「使いやすい！」を実現しました。

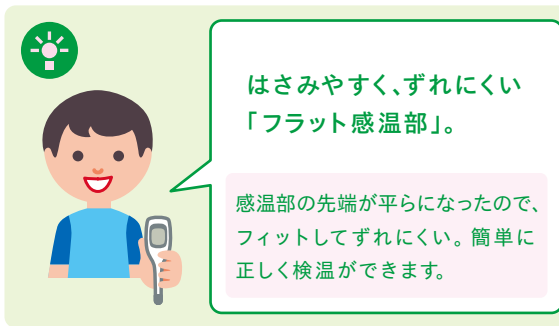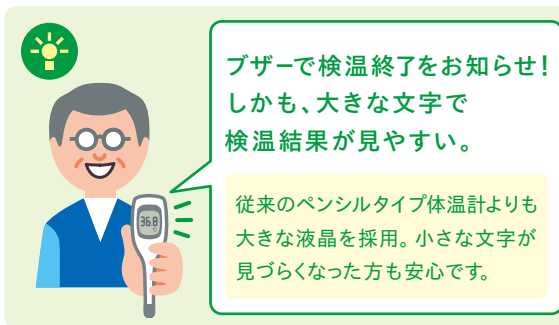

通常わきで正しい体温を測るには約10分間必要ですが、MC-681は長年オムロンが培った温度の上がり方の分析・演算技術により約20秒で10分後の体温を正確に予測することができます。

