

ぐぐっと気持ちいい! 足裏マッサージ。

# Foot Massager

オムロン フットマッサージャ HM-240



BW(ブラウン)



PK(ピンク)

HM-240-BW(ブラウン) / PK(ピンク)

オープン価格 管理医療機器 家庭用電気マッサージ器

パッケージ寸法(質量): 幅約320×高さ約175×奥行約320mm(約2.0kg)

アウター寸法(質量): 幅約364×高さ約340×奥行約654mm(約9.03kg)

箱入数: 4

主な仕様 ※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

- 販売名…オムロン フットマッサージャ HM-240 ●一般名称…家庭用電気マッサージ器 ●医療機器分類…管理医療機器
- 使用目的/効能効果…あんま、マッサージの代用を目的として、一般家庭で使用する。 ●定格入力…30W(ヒーター部 4.5W含む)
- 本体質量…約1.3kg ●外形寸法…幅約310×高さ約180×奥行約320mm(フードあり) ●対応足サイズ…27cm以下 ●付属品…専用ACアダプタ、フード、メッシュ布カバー、取扱説明書(品質保証書付き) ●医療機器認証番号…224AABZX00150000

## △ 使用上のご注意

- 医師からマッサージを禁じられている方は使用しないでください。(例: 血栓(塞栓)症、重度の動脈リゅう(瘤)、急性静脈リゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など) ●事故や体調不良の原因になります。
- 次の人は医師と相談してご使用ください。  
脚部に重度の血行障害のある人/悪性腫瘍のある人/心臓に障害のある人/温度感覚喪失が認められる人/妊娠初期の不安定期または出産直後の人/糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人/皮膚に創傷のある人/安静を必要とする人/体温38℃以上(有熱期)の人 例)急性炎症症状(倦怠感、悪寒、血圧変動など)の強い時期や衰弱しているとき/骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなどの急性(疼痛性)疾患の人/医師の治療を受けている人や、特に身体に異常を感じている人/かつて治療を受けたところや、または疾患部へ使用する人/体力の衰えた人/腱鞘炎の人 ●事故や体調不良の原因になります。
- 次のような医用電気機器との併用は、絶対しないでください。  
(1)ペースメーカーなどの体内植込型医用電気機器 (2)人工心肺などの生命維持用電気機器 (3)心電計などの装着型医用電気機器 ●これら医用電気機器の誤動作をまねき、生命に著しい障害をもたらす原因になります。
- 足裏以外には使用しないでください。 ●事故やけがの原因になります。
- 分解や修理、改造をしないでください。 ●発火したり、故障や事故の原因になります。

BW(ブラウン)



4 975479 408588

PK(ピンク)



4 975479 408571

お問い合わせ、ご用命は…

オムロンなら、わからないことを気軽に相談できます。

修理・商品に関するお問い合わせ/別売品・消耗部品のお求めは  
オムロンお客様サービスセンター TEL 0120-30-6606 FAX 0120-10-1625  
受付時間(祝日を除く月～金)9:00～19:00 ※都合によりお休みをいただいたり、受付時間帯を変更させていただくことがありますのでご了承ください。 ※ダイヤルは正確におかけください。

製造販売元 オムロンヘルスケア株式会社 〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地 <http://www.healthcare.omron.co.jp/>

DA240 1VM M12A

©OMRON HEALTHCARE Co.,Ltd. 2012. All Rights Reserved.



# Foot Massager

All for Healthcare

オムロン フットマッサージャ HM-240

おやすみ前の、  
極上リフレッシュタイム。



### うれしい静音設計

夜でも周りに気兼ねなく、静かに使えます。


お風呂上りや寝る前など、  
好きな時にご使用いただけます。

### 足裏の好きな部位をマッサージ。

回転する2つのもみ玉を、  
足裏の好きな部位に当ててマッサージできます。  
ヒーターを使用する事で、  
あたたかきもみ感を楽しむこともできます\*。



ヒーターボタンを  
押すと、もみ玉が  
温まります\*。

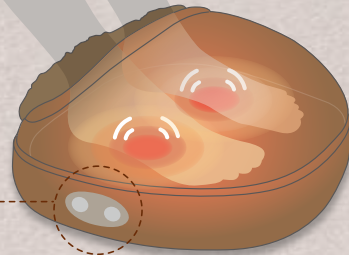

\*ヒーターによる温熱治療効果はありません。

### フード、メッシュ布カバーは着脱・洗濯可能。

フードを付けて暖かく、フードを外せば、  
メッシュ布カバーで通気性良くマッサージできます。  
汚れても手軽に手洗いできるから、  
いつでも清潔にご使用いただけます。



フード

メッシュ布カバー