

オムロン体温計Q&A


Q1 正しく検温するためのポイントは？

A 正確な体温を知るためには、体温計の先端をわきの中心にあてて、測定終了までその位置を保つ必要があります。



Q2 なぜ60秒で検温できるの？

A 通常、わきで正しい体温を測るには約10分必要です。より早く正確な検温を可能にするために、オムロンは60秒予測検温を採用。検温開始から体温の上がり方を分析・演算することで、約10分後の体温を平均60秒で予測します。

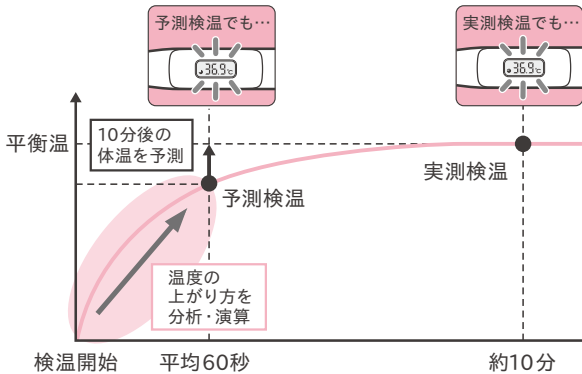

MC-675/674では、予測検温だけでなく実測検温もできます。

実測検温する場合 予測検温後もはさみ続けていると、約60秒後に実測検温がスタート。約10分後「ピリリィ」と3回ブザーが鳴り検温の終了をお知らせします。

仕様 ※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

●販売名…オムロン電子体温計MC-675/674●電源電圧…<MC-675>DC3.0V(リチウム電池CR1220×1個)<MC-674>DC3.0V(リチウム電池CR1025×1個)●消費電力…0.01W●電池寿命…<MC-675>約730回(予測測定)約500回(実測測定)<MC-674>約12000回(予測測定)約2000回(実測測定)●感温部…サーミスタ●測定方式…予測・実測●体温表示…3桁+℃表示、0.1℃毎●測定精度…±0.1℃(標準室温23℃にて、恒温水槽で実測測定した場合)●測定範囲…32.0~42.0℃●使用環境湿度…周囲温度: +10~+40℃、相対湿度: 30~85%RH●保管環境湿度…周囲温度: -20~+60℃、相対湿度: 10~95%RH●質量…<MC-675>約17g(電池含む)<MC-674>約15g(電池含む)●外形寸法…<MC-675>幅20×長さ135×奥行き13.2mm<MC-674>幅17.8×長さ135×奥行き12.4mm●付属品…<MC-675>お試し用電池(リチウム電池CR1220×1個)、<MC-674>お試し用電池(リチウム電池CR1025×1個)収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書●医療機器認証番号…<MC-675>221AGBZX00102000<MC-674>221AGBZX00103000

<MC-675>

| | 個装箱 | サブカートン | マスターカートン |
|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 寸法(幅×高さ×奥行き) 質量 | 72×195×49.2mm (約60.5g) | 292×201×87mm (約450g) 5台/ケース | 609×242×466mm (約5.2kg) 50台/ケース |

<MC-674>

| | 個装箱 | サブカートン | マスターカートン |
|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 寸法(幅×高さ×奥行き) 質量 | 72×195×49.2mm (約58.5g) | 292×201×87mm (約440g) 5台/ケース | 609×242×466mm (約5.1kg) 50台/ケース |



△安全に関するご注意

- 検温結果の自己診断や治療は危険です。医師の指導に従ってください。
 - 本商品はわき専用の体温計です。わき以外(耳や口中など)で検温しないでください。◎耳などを傷つける原因になります。
 - 乳幼児の手の届かないところに保管してください。またお子様だけのご使用はさけてください。
- ※ご使用前に取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。

お問い合わせ、ご用命は…



オムロンなら、わからないことを気軽に相談できます。

修理・商品に関するお問い合わせ／別売品・消耗部品のお求めは
オムロン お客様サービスセンター

※受付時間(祝日を除く月~金)9:00~19:00※都合によりお休みをいただいたり、受付時間帯を変更させていただくことがありますのでご了承ください。※ダイヤルは正確におかけください。

通話料無料 **0120-30-6606**
 通信料無料 **FAX 0120-10-1625**

製造販売元 **オムロンヘルスケア株式会社**
 〒615-0084 京都市右京区山ノ内山ノ下町24番地 <http://www.healthcare.omron.co.jp/>

DA210 ①ZQM 097 ©OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 2009. All Rights Reserved.

オムロン電子体温計
MC-675/674
けんおんくん 予測・実測 わき専用



A Good Sense of Health

「きちんと検温できている？」
“わきびたセンサ”が、
その不安を解消します。



60秒
予測検温

“わきびたセンサ”搭載

- フラット感温部 ●予測(平均60秒)+実測
- 電池交換可能 ●前回値メモリ ●お知らせブザー付き
- 抗菌樹脂使用 ●収納ケース付き

オムロン電子体温計 MC-675

けんおんくん 予測・実測 (わき専用)

メーカー希望小売価格 ¥3,255(税込) [本体価格¥3,100]

すばやい検温を
光と音でサポート

“わきびたセンサ”は、動きの多い小さなお子様を測ってあげる時にも、体温計のずれをすばやく感知して、正しい検温を続けられるよう光と音でサポートします。



これが“わきびたセンサ”

※MC-675のみ



しっかりはさめていると
「緑色」のランプが点灯。
正しく検温が開始された
ことを確認できます。



検温中にわきからずれると
「赤色」のランプとブザー
でお知らせ。はさみ直すと
検温を続けられます。



はさみやすく
ずれにくい
フラット感温部



先端が平らになった、オムロン独自のフラット形状を感温部に採用。わきにしっかりフィットしてずれにくいいため、誰でも簡単により正しい検温が可能に。これからの体温計のスタンダードとなる新形状です。

保管や携帯に
安心・便利な
収納ケース付き



抗菌樹脂使用

本体をまるごと収納できる抗菌ハードケース付き。水やほこりから体温計をしっかりと守ります。



シンプルに使えるスタンダードタイプ

60秒
予測検温

- フラット感温部 ●予測(平均60秒)+実測
- 電池交換可能 ●前回値メモリ ●お知らせブザー付き
- 抗菌樹脂使用 ●収納ケース付き

オムロン電子体温計 MC-674

けんおんくん 予測・実測 (わき専用)

メーカー希望小売価格 ¥2,888(税込) [本体価格¥2,750]