

## 主な仕様 ※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

●販売名…オムロン 電子体温計 けんおんくん MC-612 ●電源電圧…DC3V (リチウム電池 CR2032×1個) ●消費電力…0.01W ●電池寿命…約1700回 (予測検温) 約300回以上 (実測検温、10分/回) (リチウム電池 CR2032 使用時) ●感温部…サーミスタ ●測定方式…予測・実測 ●体温表示…3桁+℃表示、0.1℃毎 ●測定精度…±0.1℃ (標準室温 23℃にて恒温水槽で実測測定した場合) ●測定範囲…35.0～42.0℃ ●使用環境温湿度…周囲温度：+10～+40℃、相対湿度：30～85% RH ●質量…約35g (電池含む) ●外形寸法…幅34.6×高さ148.7×奥行き38mm ●付属品…お試し用電池 (リチウム電池 CR2032×1個)、収納ケース、取扱説明書 (品質保証書付)、困ったときにお読みくださいガイド ●医療用具許可番号 24BY0001

	個装箱	サブカートン	マスターカートン
寸法 (幅×高さ×奥行き) 重量	50×191×35mm (83g)	185×194×104mm (900g)10台/ケース	548×230×385mm (10kg)100台/ケース

## ▲安全に関するご注意

- ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みの上、正しく安全にお使いください。
- 検温結果の自己診断、治療は危険ですので医師の指導に従ってください。
  - 自己診断は、病気が悪化する恐れがあります。
- 本機は耳式体温計ではありません。わき・口中以外で検温しないでください。
  - 耳などを傷つける恐れがあります。
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。また子供だけで使わせしないでください。
  - 自分で無理に測ろうとしてけがをする恐れがあります。

お問い合わせ、ご用命は…

わからないことは何でも相談できる。オムロンなら安心です。

## 修理・商品に関するお問い合わせ/別売品・消耗部品のお求めは オムロン お客様サービスセンター

- ※受付時間 (祝日を除く月～金) 9:00～19:00
- ※都合によりお休みさせていただくことがあります。
- ※ダイヤルは正確におかけください。

むろんオムロン

通話料無料

 **0120-30-6606**

通信料無料

 **0120-10-1625**

オムロンヘルスケア株式会社

〒615-0084 京都市右京区山ノ内山ノ下町24番地 <http://www.healthcare.omron.co.jp/>


DA143

©OMRON HEALTHCARE Co.,Ltd. 2003, All Rights Reserved.

# OMRON

オムロン 電子体温計 けんおんくん MC-612

SPEEDY  
けんおんくん

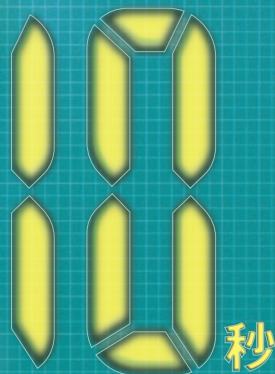

A Good Sense of Health

オムロン独自の「瞬間センシング」で  
わき・口中予測10秒(平均)を実現

オムロン 電子体温計 けんおんくん MC-612  
メーカー希望小売価格 ¥3,800(税別)


10秒(平均)だから  
小さなお子様の  
検温もらくらく

わきでも口中でも、  
予測式なら10秒(平均)で  
測れるので、お子様からお年寄りまで  
どなたでも簡単に検温できます。



グローバル  
先端技術採用で  
正しく測定

血管から皮膚までの熱の流れを測定し、  
それを瞬時に体温に変換する世界最先端技術、  
R.A.T.E™ (Rapid Accurate Temperature Establishment) Technology  
予測式なら10秒(平均)と、より  
スピーディーで正確な検温ができます。  
(実測では、わき10分・口中5分)

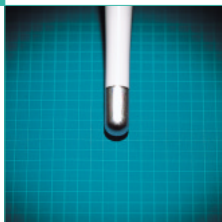

R.A.T.E.™  
Technology  
A trademark of Medisim Ltd.

持ちやすく  
ボディにフィット  
するデザイン

持ちやすさ、使いやすさを  
人間工学的に考えた、  
流面形のユニバーサルデザイン。  
ボディにフィットするので、  
安全、確実な検温が可能です。



使いやすさを  
追求した機能

- わき・口中両用  
スイッチで、検温する  
部位を選べます。
- 大型表示画面  
大きな数字とイラ  
ストで、測定結果  
をわかりやすく表示  
します。
- 前回値メモリ  
前回の数値が表示  
され、体温の変化  
がわかります。
- オートパワーオフ  
電源を切り忘れても、  
約1分後に自動的  
に電源が切れます。
- 抗菌樹脂使用  
お子様にも安心して  
お使いいただける  
清潔設計。
- ブザーでお知らせ
- 収納ケースつき
- 電池交換可能



このパッケージを  
目印に  
お求めください

