



オムロン MC-680が
解決します!



オムロン 電子体温計 MC-680
メーカー希望小売価格 ¥2,625(税込)
けんおんくん 予測・実測 わき専用

本体質量：約14g(電池含む)
外形寸法：幅20×長さ136.8×厚さ12.7mm
医療機器認証番号：223AGBZX00123000

管理医療機器

仕様 ※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

●販売名…オムロン 電子体温計 MC-680 ●一般的名称…電子体温計 ●医療機器分類…管理医療機器 ●使用目的、効能又は効果…本製品は、サーミスタ式の電子体温計です。体温計の感温部をわきに接触させて、人の体温を測定し、最高温度を保持しデジタル表示します。わき専用。●電源電圧…DC3V(アルカリボタン電池LR41×2個) ●消費電力…0.01W ●電池寿命…約5000回(予測検温)約1700回(実測検温) ●感温部…サーミスタ ●体温表示…3桁+℃表示、0.1℃毎 ●測定精度…±0.1℃(標準室温23℃にて恒温水槽で実測測定した場合) ●測定範囲…32.0~42.0℃ ●使用環境温湿度…周囲温度：+10~+40℃、相対湿度：30~85%RH ●質量…約14g(電池含む) ●外形寸法…幅20×長さ136.8×厚さ12.7mm ●付属品…お試し用電池(アルカリボタン電池LR41×2個)、収納ケース、取扱説明書(医療機器添付文書・品質保証書付き)、EMC技術資料 ●医療機器認証番号…223AGBZX00123000

	個装箱	サブカートン	マスターカートン
寸法(幅×高さ×奥行き)	72×187×42mm (約60g)	266×190×181mm (約800g) 10台 / ケース	925×221×279mm (約5.4kg) 50台 / ケース



4 975479 425615

▲安全に関するご注意

- 検温結果の自己診断や治療はしないでください。医師の指導に従ってください。
 - 人の検温以外に使用しないでください。
 - 本製品はわき専用の体温計です。わき以外(耳や口中など)で検温しないでください。
 - 乳幼児の手の届かないところに保管してください。また、お子様だけのご使用はさせていただきます。
- ※ご使用前に取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。

お問い合わせ、ご用命は…

オムロンなら、わからないことを気軽に相談できます。

修理・商品に関するお問い合わせ/別売品・消耗部品のお求めは
オムロン お客様サービスセンター
※受付時間(祝日を除く月~金)9:00~19:00 ※都合によりお休みをいただいたり、受付時間帯を変更させていただくことがありますのでご了承ください。※ダイヤルは正確におかけください。

通話料無料 **0120-30-6606**
通話料無料 **0120-10-1625**
FAX

製造販売元 **オムロンヘルスケア株式会社**
〒615-0084 京都市右京区山ノ内山ノ下町24番地 <http://www.healthcare.omron.co.jp/>
DA225 ①VM ②M118 ©OMRON HEALTHCARE CO., Ltd. 2011. All Rights Reserved.

OMRON

音と光で
検温終了を
はっきりお知らせ

わき専用 予測+実測

フラット感温部

前回値メモリ

オートパワーオフ

電池交換可能

収納ケース付き



予測検温(平均)

オムロン 電子体温計 MC-680
けんおんくん

A Good Sense of Health



検温時のこんな悩み
ありませんか？

オムロンの最新技術で
ご家族みんなの「使いやすい！」を実現しました。




ちゃんと
測り終わるまで
動いちゃ
ダメでしょ。



ブザーが
聞こえなかったけど
一人でちゃんと
測れたのかな？



最近
小さな文字が
ちょっと
見づらいな。

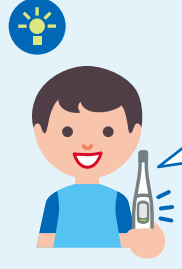

検温時間は
わずか **15秒**
予測検温(平均)

小さなお子様も
最後まであきらめなく
きちんと検温できます。



音と光
検温終了を
ダブルでお知らせ！

ブザーを聞き逃しても、
ランプの点滅で
正しく測れたか分かります。



従来のペンシルタイプ
体温計よりも
大きな文字で見やすい！

小さな文字が見づらくなった方や、
眼鏡が手元のない時にも安心。

◎なぜ15秒で測れるの？

通常わきで正しい体温を測るには約10分間必要ですが、MC-680は長年オムロンが培った体温上昇の分析・演算技術により約15秒で10分後の体温を正確に予測、さらに短時間で体の熱をしっかりとらえ、検温中にずれにくい「フラット感温部」を採用することで、すばやく正確な検温を実現しました。

高速検温を実現し、
ずれにくい
フラット感温部。

※より正確な測定には実測検温(10分)をおすすめします。

予測検温が終了すると、お知らせブザーになります。それに加えて液晶横の緑のランプが15回点滅。音と光、ダブルで検温終了をお知らせします。

測定開始 検温終了

持ち運びや収納に便利な
収納ケース付き。

当社従来品: MC-674

MC-680

※原寸大