

## 吸入器のスチームが、 はな・のどにいいのはどうして？

カゼや花粉などで不快感のある「はな」「のど」には、スチームが効果的です。それは、炎症を起こしている粘膜に十分なうるおいを与えることで不快感を改善し、さらに体にそなわっている自然の回復力をサポートしてくれるからです。



### ● 使い方は簡単



① ボイラーカップ内側の注水線まで水を入れます。



② 給・排水カップに水を入れます。



③ 切り替えレバーを回して、「はな」か「のど」を選びます。



④ 電源を入れて、吸入スタート。

### ● 清潔さにもこだわりました

吸入口カバーが未使用時の本体へのホコリの浸入を防ぎます。

カルキ付着による目づまり防止のためボイラーカップは取り外して丸洗いが可能になりました。



### 仕様 ※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

●販売名…オムロン 吸入器 NE-S19 ●一般の名称…家庭用電熱式吸入器 ●医療機器分類…管理医療機器 ●使用目的/効能効果…鼻腔と咽喉の加温、洗浄により不快感の改善を目的とし、一般家庭で使用。 ●電源…AC100V 50/60Hz ●消費電力…250W ●ボイラータンク容量…約40mL ●給・排水カップ容量…約110mL ●本体質量…約970g(吸入口カバーを除く) ●外形寸法…幅約111×高さ約248×奥行約279mm ●付属品…吸入口カバー、吸入口、のど/はな切り替えレバー、計量カップ、本体カバー、温度調節ルーバ、タンクキャップ、ボイラーカップ、ノズル、ノズル清掃ピン、給・排水カップ、計量カップ、取扱説明書(品質保証書付き) ●医療機器認証番号…222AGBZX00217000

	個装箱	サブカートン	マスターカートン
寸法(幅×高さ×奥行) 質量	206×220×201mm (約1,500g)	—	454×430×234mm (約7kg) 4台 / ケース



### ▲ 安全に関するご注意

- 次の人は医師と相談してご使用ください。
  - ・呼吸器に疾患のある人・温度感覚喪失が認められる人
  - ・耳鼻咽喉に疾患のある人・医療機関で治療中の人
- ◎ 症状が悪化する原因になります。
- 薬剤を用いての吸入療法に使用しないでください。
  - また、吸入水に薬液は絶対に使用しないでください。
  - ◎ 症状が悪化する原因になります。
  - ◎ 本商品の機能が低下する原因になります。

お問い合わせ、ご用命は…

### オムロンなら、わからないことを気軽に相談できます。

## 修理・商品に関するお問い合わせ／別売品・消耗部品のお求めは オムロン お客様サービスセンター

※受付時間(祝日を除く月～金) 9:00～19:00 ※都合によりお休みをいただいたり、受付時間帯を変更させていただくことがありますのでご了承ください。 ※ダイヤルは正確におかけください。

通話料無料



0120-30-6606

通信料無料



0120-10-1625

製造販売元 オムロンヘルスケア株式会社

〒615-0084 京都市右京区山ノ内山ノ下町24番地 <http://www.healthcare.omron.co.jp/>

DA220 ①ZQM ①109 ©OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 2010. All Rights Reserved.

# オムロン吸入器 NE-S19

たっぷりスチーム  
+ 最適ミクロン

ダブルメリットではな・のどスッキリ



A Good Sense of Health

気になる症状にたっぷり届く  
オムロンだけのこだわりスチーム。  
3つの安全機能でさらに安心を。

～こんな時にご使用ください～



花粉やアレルギーで、  
はながムズムズする時に。

乾燥の季節やカゼで  
のどが不快な時に。



薬をのまずに、  
はなやのどの症状を  
やわらげたい時に。

オムロン吸入器  
NE-S19  
オープン価格  
医療機器認証番号 222AGBZX00217000

## 「たっぷりスチーム」+「最適ミクロン」で はな・のどをスッキリ快適に。

毎分約6mL\*もの豊富な蒸気を送り出す「たっぷりスチーム」と、約13ミクロン\*の安定した粒子を生み出す「最適ミクロン」が、はなやのどの奥まで、しっかり届いて、すばやく浸透します。また薬を使わないので、お子様や妊娠中の方にも安心してご使用いただけます。

※本値は代表値です。

### ● はな⇄のど ワンタッチ切替

はなからの吸入も、のどからの吸入も、  
レバーを軽く動かすだけ。  
簡単に切り替えできます。



### ● 約30秒クイックスタート

スチームが出てくるまでの時間は  
わずか30秒。使いたいと思ったら、  
待たずにすばやく吸入できます。

### ● 約40℃～45℃の ルーバ式温度調節

症状や使う方の気持ちよさに合わせて  
温度調節が可能。  
ルーバを押すだけの手軽さです。



お子様も安心

## これが3つの安全機能



### ① オートパワーオフ機能

スチームが終了すると、自動的に電源をオフ。  
高温のまま放置されることなく安心。  
また省エネにもつながります。

### ② 空焚きを ランプでお知らせ

ボイラータンクに水が入っていない  
状態で電源を入れると、  
ランプが点滅してお知らせ。  
空焚きや故障を防ぎます。



### ③ 傾きを検知する 安全スイッチ

本体を持ち上げたり  
傾けたりした時に、  
底にある安全スイッチが作動し、  
電源をオフ。やけどなどの事故を防ぎます。



温度調節ルーバ

### ● スチーム量調整

使う部位や症状に合わせて  
スチーム量の調整が可能。  
本体の横についたスイッチで  
吸入中でも操作できます。



### ● かんたんお手入れ

吸入口カバー、吸入口、  
温度調節ルーバなどの部品は  
分解して丸洗いOK。  
いつも清潔な状態で  
ご使用いただけます。

傾きを検知する  
安全スイッチ

空焚きを  
ランプでお知らせ