

はじめにお読みください

スタートアップガイド

婦人用電子体温計
— MC-652LC編 —



スマートフォン
で使える

「OMRON connect」アプリに登録すると、
体温計の設定（アラーム、ブザー音、バックライト）や測定記録の管理がおこなえ、
ほかのアプリやサービスとデータ連携することができます。

5344821-0D
MC-652LC

「OMRON connect」アプリについて

オムロンの婦人用電子体温計をお買い上げいただき、ありがとうございました

この体温計は、「OMRON connect」アプリに登録すると最大 40 日分の基礎体温データを記録します。
忙しい朝も測定するだけ。休日にゆっくりデータ転送と基礎体温リズムをチェックできます。



OMRON connect の詳しい内容はこちら：

<https://www.omronconnect.com/>

推奨環境はこちら：

<https://www.omronconnect.com/devices/>

QRコード



「OMRON connect」アプリのよくあるご質問

<https://www.omronconnect.com/support/>

お知らせ

- ・ 1台のスマートフォンで、1ユーザーのデータを管理します。
- ・ 本サービスに転送されたデータは、お使いのスマートフォンに保存されます。
- ・ 測定したデータはひとつのアプリにのみ転送可能です。複数のアプリに同時にご利用できません。

商標について

- ・ Bluetooth® のワードマークは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、オムロンヘルスケア（株）は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
- ・ iPhone は Apple Inc. の商標です。
- ・ iPhone の商標は、アイホン株式会社とのライセンスに基づき使用されています。
- ・ Android は Google Inc. の商標または登録商標です。
- ・ 「OMRON connect」アプリの仕様および本書に記載されている内容は、予告なしに変更することがあります。

■ 「OMRON connect」アプリで設定できること

「OMRON connect」アプリに登録すると次の項目の設定や変更ができます。

- ・ アラーム …………… アラーム時刻、音量（大・中・小・OFF）の設定ができます。
アラームは約 1 分間鳴ります。収納ケースから取り出すと止まります。
- ・ ブザー音 …………… 音量（大・中・小・OFF）の設定ができます。
ブザー音とは、測定終了時やデータ転送時の音のことです。
- ・ バックライト ……… ON / OFF の設定ができます。

設定を変更するときは、「OMRON connect」アプリで設定内容を変更してください。
設定を変更したときは、体温計に変更内容を反映させるため、必ず転送してください。

ご使用上の注意事項

基礎体温のデータを記録するには、「OMRON connect」アプリへの登録が必要です。

スマートフォンで登録・転送する

はじめてお使いの方 …………… STEP 1から

すでにOMRON connectをご利用の方 …… STEP 3から 始めてください

STEP 1 スマートフォンの「設定」からBluetoothを「オン」にする

- ① スマートフォンの「設定」を開く
 - ② Bluetoothを「オン」にする
- ※Bluetooth設定画面に機器が表示されても、選択して接続をしないでください。

STEP 2 「OMRON connect」アプリをインストールする

- ① 以下のいずれかの方法で、アプリをインストールする準備をする

A. ウェブサイトにアクセスする

<https://www.omronconnect.com/setup/>

QRコード



B. App Store、Google Playにて
「オムロンコネクト」で検索する



オムロンコネクト 🔍

- ② 「OMRON connect」アプリをインストールする

STEP 3 「OMRON connect」アプリに体温計を登録する

はじめてお使いの方

①「OMRON connect」アプリを起動し、画面に従って体温計を登録する

すでに「OMRON connect」アプリをご利用の方

① 画面左上の「メニュー」から「機器」を選び、「機器の追加」をタップして本製品を登録する



STEP 4 体温計で測定したデータを「OMRON connect」アプリで確認する

① 体温測定後、収納ケースにしまってランプの点滅を確認する

LEDランプ点滅（遅）中

データ転送可能

LEDランプ点滅（遅）していないとき

一度収納ケースから本体を取り出し、もう一度収納ケースに入れる

② 「OMRON connect」アプリのホーム画面を、指で下方向にスライドさせる



③「OMRON connect」アプリで、グラフや数値を確認する

「通信」マークについて


☞ が点滅／点灯したときは、すみやかに測定記録を転送してください。

点滅：32日分以上の測定記録があります。

点灯：40日分の測定記録があります。古い測定記録から順に削除されます。

すぐに測定記録を転送してください。

「通信」マーク

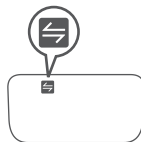

- ・「OMRON connect」アプリにデータ転送をおこなったとき、正確な時間に合わせるために、時刻が補正されます。
- ・電池交換マーク 点灯中は転送できません。

◆ 転送状態一覧

| | LED ランプ | 音 | 機器の表示 |
|--------|---------|---------|-------|
| 転送待機 | 点滅（遅*1） | — | |
| 転送中 | 点滅（速） | — | |
| 転送完了 | 点灯 | ピーピー！ | |
| 転送失敗*2 | 点滅（速） | ピーピーピー！ | |

*1 LED の点滅間隔は内容により2種類のスピードがあります。

速…LED 点滅間隔は 0.5 秒

遅…LED 点滅間隔は 1 秒

*2 転送が失敗したときは、アプリの指示にしたがって、データ転送をやり直してください。

◆ Bluetooth通信を OFF にする方法

体温計の電池カバーを外し、ボタンを 5 秒間押してください。

Bluetooth通信を OFF にすると体温計の表示が図のように変わります。

重要 下記のような無線機器の使用が禁止された区域では、本体の Bluetooth通信を OFF にしてください。

- ・ 航空機に乗るとき
- ・ 病院にいるとき
- ・ 日本国外にいるとき

設定を解除したい場合も Bluetooth通信を OFF にしてください。

Bluetooth通信を OFF にした後、もう一度 ON するためには、Step3 「「OMRON connect」アプリに体温計を登録する」をおこなってください。

