

## 取扱説明書

要保存

保証書別添



- このたびは、オムロンマッサージチェアをお買い上げいただきましてありがとうございました。
- 安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
- 本書はいつもお手元においてご使用ください。

商品に関するお問い合わせは  
オムロンお客様サービスセンター ダイヤルは正確に  
おろんオムロン  
☎ 電話 **0120-30-6606** 通話料無料  
FAX **0120-10-1625** 通信料無料  
受付時間 9:00~19:00 (祝日を除く月~金)  
(都合によりお休みさせていただくことがあります。)

A Good Sense of Health

オムロン マッサージチェア  
pisu (ピ・イス)

## HM-411

### もくじ

#### ご使用前の前に

安全上のご注意	1
商品の特長	4
商品の構成	4
各部の名前とはたらき	5
設置する	6

#### 使い方

ご使用前の確認	7
椅子に座る	8
電源を入れる	9
自動コースでマッサージする	10
おこのみでマッサージする	11
マッサージが終わったら	13

#### こまったときに・仕様など

お手入れと保管	14
おかしいな?と思ったら	15
お問い合わせ先	16
仕様	17
自動コース動作一覧	18

# 安全上のご注意

お使いになる前によくお読みください

- ここに示した警告サインと図記号の例は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。
- 表示と意味は次のようになっています。

警告サイン	内容
 <b>警告</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容を示します。

\*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

## 図記号の例



△記号は注意（警告・危険を含む）を示します。  
具体的な注意内容は、△の中や近くに文章や絵で示します。  
左図の場合は“感電注意”を示します。



⊘記号は禁止（してはいけないこと）を示します。  
具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに文章や絵で示します。  
左図の場合は“分解禁止”を示します。



●記号は強制（必ず守ること）を示します。  
具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。  
左図の場合は“一般的な強制”を示します。

## 警告

次の方は、必ず医師と相談の上で使用ください。

- 医師の治療を受けている人や特に体に異常を感じている人
  - 背骨に異常のある人、背骨が曲がっている人
  - 悪性腫瘍のある人 ■急性症状のある人
  - 骨粗しょう症の人 ■妊娠中や生理中の人
  - 安静を必要とする人
  - 心臓に障害のある人（狭心症、心筋梗塞等の疾患のある人、ペースメーカー使用の人）
  - かつて治療を受けたところまたは患部へ使用する人 ■熱の高い人 ■体力の衰えた人
  - 知覚障害のある人
- ・事故や体調不良を起こす恐れがあります。

スウィングしますので、十分なスペースがあることを確認してください。また本機の下や後ろに人（特に幼児や子供）やペット、家具など障害物が無いことを確認してください。

- ・ケガをさせたり、家具や本機を傷つける恐れがあります。

幼児や子供に使用させたり、本機の上で遊ばせたりしないでください。

特に幼児や子供を座部に寝かせないでください。

- ・ケガをする恐れがあります。

自分で意思表示できない方への使用はおやめください。また、体の不自由な方は必ず介護の方の付き添いの上で使用してください。

- ・体調不良やケガをする恐れがあります。

頭、おなか、肘、ひざ、手などへの使用や、うつぶせでの使用はしないでください。

- ・体調不良やケガをする恐れがあります。

マッサージ機能は治療目的以外には使用しないでください。

- ・体調不良やケガをする恐れがあります。

浴室など湿気の多い場所で使用しないでください。また、屋外では使用しないでください。

- ・火災、感電、故障の原因になります。

ご使用前には必ず、本体の布地が破れていないか確認し、わずかでも破れた状態では使用しないでください。

- ・ケガをする恐れがありますので、オムロンお客様サービスセンターへ修理の依頼をしてください。（P16ページ）

## 警告

もみだまの間に手などを入れないでください。

- ・ケガをする恐れがあります。

同時に2人以上で使用しないでください。

- ・ケガをする恐れがあります。また、床面や本機を傷める恐れがあります。

濡れた手で電源プラグの抜き差しや、主電源スイッチまたはリモコンの操作をしないでください。

- ・感電やケガをする恐れがあります。

本機を分解したり、改造したりしないでください。  
・感電する恐れがあります。また、発火したり、異常動作をして、ケガをする恐れがあります。

本機に水をかけないでください。

- ・感電する恐れがあります。また、故障の原因になります。

お手入れの際は、必ず主電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

- ・感電やケガをする恐れがあります。

## 注意

本機を設置する場合には、床面が水平な場所に置いて使用してください。

- ・不安定な場所では本機が転倒し、ケガをする恐れがあります。

設置するときは、マットなどを敷いてください。

- ・床や畳などを傷つける恐れがあります。

本機を設置するときは、ゆっくりと置いてください。

- ・ケガをする恐れがあります。  
・床や畳などを傷つける恐れがあります。

本機を移動するときは、コード類は束ねてください。持ち上げるときは、必ず2人以上で両側から脚部を持ってください。

- ・バランスを崩し、本機を落としてケガをする恐れがあります。

電源コードやリモコンコードが本機の下敷きにならないように注意してください。

- ・故障の原因になります。

電源プラグは確実に最後まで差し込んでください。

- ・感電、ショート、発火の原因になります。

座るときはもみだまの位置を確認の上、静かに座ってください。

- ・ケガをする恐れがあります。  
・床や畳などを傷つける恐れがあります。

1回の使用時間は、同一箇所には5分以内、背全体へは15分以内としてください。

- ・長時間の使用は、筋肉や神経に対して必要以上の刺激となり、逆効果になります。

使用中、気分が悪くなったり、刺激が強すぎて苦痛を感じた場合は、すぐに使用を中止してください。

- ・体調不良やケガをする恐れがあります。

使用時以外は必ず主電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜き、電源コードを束ねてください。また、リモコンはリモコンポケットに収納してください。

- ・ケガや、やけどをする恐れがあります。  
・絶縁劣化により感電や漏電火災の原因になります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜いてください。

- ・電源コードが断線やショートして火災や感電の原因になります。

本機が動作しない場合や、スウィング動作など、おかしいと感じたときは、使用をただちに中止し、主電源スイッチを「切」にし、電源プラグを抜いて、オムロンお客様サービスセンターへ修理の依頼をしてください。（P16ページ）

- ・ケガをする恐れがあります。  
・感電、ショート、発火の原因になります。

停電時はただちに主電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

- ・事故やトラブルにつながる恐れがあります。

眠りながらの使用はしないでください。

- ・体調不良やケガをする恐れがあります。

頭部に髪飾りなどの固い物をつけて使用しないでください。また長い髪の方は束ねるなどして使用してください。

- ・ケガをする恐れがあります。



# 安全上のご注意

## ⚠️ 注意

素肌や衣服が濡れたまま使用しないでください。  
・ケガや感電する恐れがあります。

背もたれの上ののったり、座ったり、立ち上がったたり、飛び跳ねたりしないでください。  
・ケガをする恐れがあります。また、床面や本機を傷める恐れがあります。

背もたれ裏面中央部を押さえないでください。  
・故障の原因になります。

リモコンを落下させたり、踏んだりしないでください。  
・故障の原因になります。

本機のもみだま移動部を強く押ししたり、もみだまの間に物を挟んでもみだまの動きを止めないでください。  
・やけどをする恐れがあります。また故障の原因になります。

背もたれと座部のすき間や座部の下に、手や足を入れないでください。  
・ケガをする恐れがあります。

本機の近くで、携帯電話を使用しないでください。  
・本機が誤動作する恐れがあります。

ストーブなどの熱器具の近くに置かないでください。  
・火災や故障の原因になります。

腰痛など腰の悪い方は本機を持ち上げないでください。  
・症状を悪化させる恐れがあります。

本機を移動する場合、人または物をのせたままの移動や、引きずるような移動はしないでください。

- ・腰を痛めたり、ケガをする恐れがあります。
- ・床や畳を傷める恐れがあります。

本機を移動する場合には、コード類を束ね、踏みつけないようにしてください。また、強いショックを与えたり、落としたりしないでください。  
・ケガをする恐れがあります。また故障の原因になります。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。

- ・感電、ショート、発火の原因になります。

電源コードやリモコンコードの取り扱いについては以下の項目にご注意ください。

- 傷つけたり、破損させない ■加工しない
- 無理に曲げたり、引っ張らない ■ねじらない
- 使用時は束ねない ■重い物をのせない
- 挟み込んだりしない

- ・感電や漏電火災の原因になります。また、故障の原因になります。

電源プラグにピンやゴミ、水分を付着させないでください。

- ・感電、ショート、発火の原因になります。

交流100V以外では使用しないでください。また、タコ足配線はしないでください。

- ・火災、感電、漏電の原因になります。

## 🙏 お願い

必ず衣服を着用してご使用ください。

使用時のスイッチ操作は動作を確認しておこなってください。

- ・動作が急に変わることによって苦痛を感じる場合があります。

体重100kg以上の方は本機をご使用にならないでください。

- ・故障の原因になります。

続けて使用する場合は、しばらく休んでからお使いください。

座部の上で飛び跳ねたり、強く踏みつけたりしないでください。

- ・縫い目部分や生地が破れたりする恐れがあります。

入浴剤（特にイオウ成分を含んだもの）やシャンプー、整髪料などが付着したときは、速やかに乾いた布で拭き取ってください。

雷の発生時には使用を中止し、主電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

- ・落雷があると故障の原因になります。

直射日光が当たるところに保管しないでください。

- ・生地の変色の恐れがあります。

本機を廃棄するときはお住まいの市区町村の指導に従って処分してください。

- ・環境汚染の恐れがあります。

# 商品の特長／商品の構成

## ■コンパクトタイプのマッサージチェア

小さいから置く場所に困りません。フローリングのお部屋にも、畳のお部屋にもマッチします。

## ■3つの自動コースと7種類のおこのみマッサージができます

[自動コース] 上半身コース、肩コース、腰コース

[おこのみ] もみ（上げ、反転、下げの3種類）、背筋のばし

もみ（上げ）+背筋のばし、もみ（反転）+背筋のばし、もみ（下げ）+背筋のばし

## ■最適なもみを実現する「もみ速度」制御機能を搭載

- ・低速もみではより力強く、ゆっくり、じっくりと体をほぐすマッサージを可能にしました。
- ・体の部位や状態によって選べる3段階のもみ速度により、好みのマッサージ感を実現します。

## ■スウィング機構による「快適」を追求した座り心地

- ・体重をかけると椅子全体がゆっくり「スウィング」。ゆったりとした座り心地でリラックスできます。
- ・座面と背部の角度が変わらないため、どんなスウィング角度でも肩から腰までマッサージできます。

※スウィング範囲は最大約15°です。


※スウィング時、椅子の角度は固定できません。

梱包箱の中には次のものが入っています。商品内容を確認してください。

万一、不足のものがありましたら、

オムロンお客様サービスセンター（☎電話 0120-30-6606）までご連絡ください。

### 1. 本体

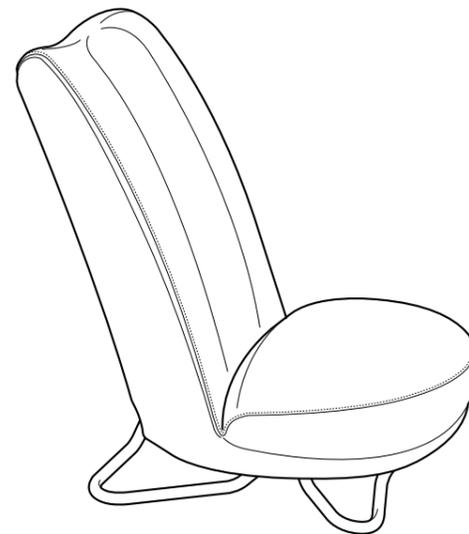


### 2. 取扱説明書（本書）

### 3. 品質保証書

※梱包箱の内フタに貼付しています。

# 各部の名前とはたらき

## 本体

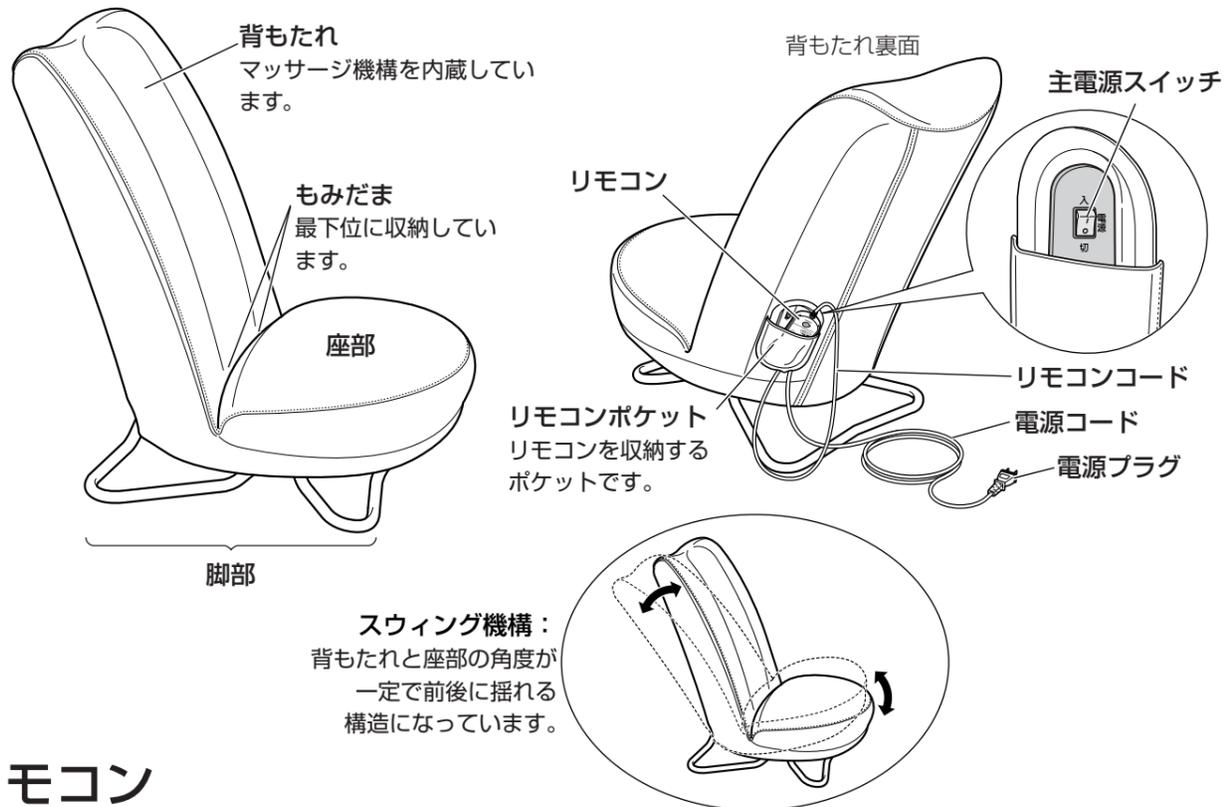


## リモコン



# 設置する

床面が水平な場所を選び、壁や人にあたらないように十分なスペースを確保してください。また床などを傷めないよう、必ずマットなどを敷いてください。


## 十分なスペースをとみましょう

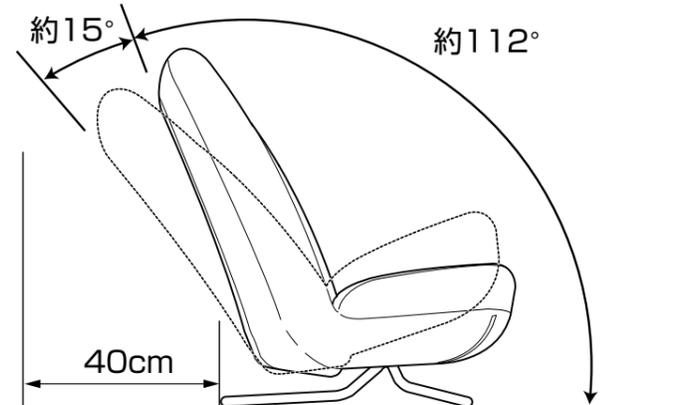

スウィングしますので、後方に40cm以上のスペースをとってください。

## マットなどを敷き、本機を置く

本機を置くときは、必ず2人で両側から脚部を持っておこなってください。  
※電源コードやリモコンコードが本機の下敷にならないようにしてください。  
※手や指を挟まないように注意して置いてください。

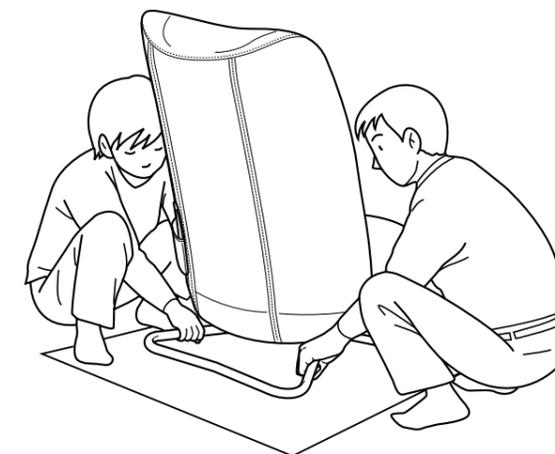

## 設置後移動するときは

本機を移動するときは、2人で両側から脚部を持っておこなってください。

- 1 電源コード、リモコンコードを束ねる  
リモコンはリモコンポケットに収納してください。
- 2 図の点線部分を2人で持って移動する

必ず2人で  
持ってください!



# ご使用前の確認

本機を安全にお使いいただくために必ず使用前に点検してください。

## ✓ チェック1

背もたれの布地が破れていないか確認する



## ✓ チェック2

コードなどを確認する


コード類

・ 破損や破れがないか確認する

リモコン

・ ひび・破損がないか確認する


・ 操作面に破損やはがれがないか確認する

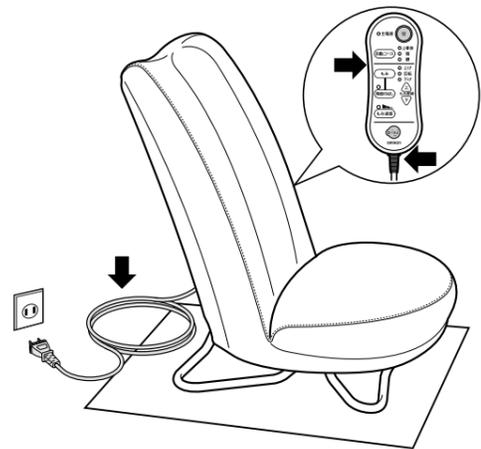

## ✓ チェック3


電源コードとリモコンコードが本機に巻きついていないか確認する

・ コードが脚部に踏まれていないか確認する

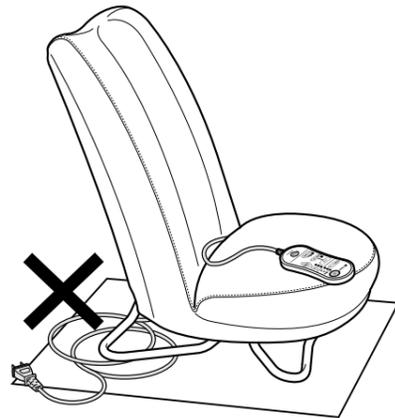

## ✓ チェック4

本機の周辺に人やペットがいないか、物などがないか確認する

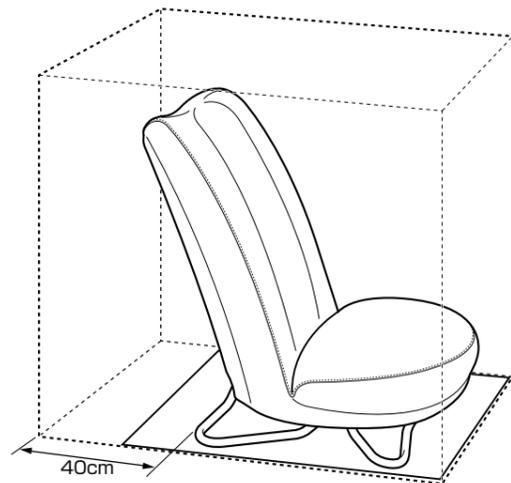

ご使用前の確認の結果、異常が発見されたときは…


・ そのまま使用せずに、オムロンお客様サービスセンターまで修理を依頼してください。(☎ 16ページ)

# 椅子に座る

## 1 もみだまの位置を確認し、ゆっくりと座る

※椅子の中央に座るようにしてください。

※マッサージが強いと感じたら、バスタオルなどをあてて調節してください。

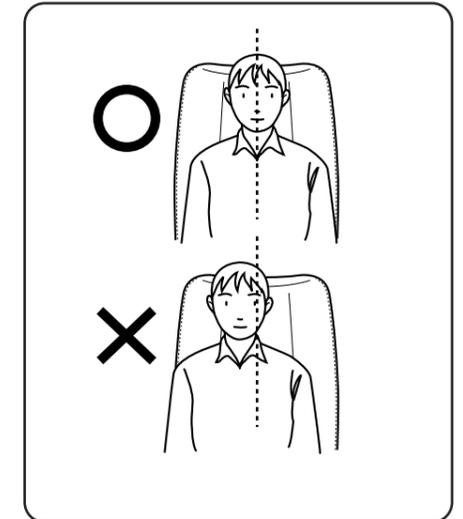

椅子の中央に座ります。

## 2 ゆっくりと、体重を背もたれにかける

ゆっくりと体重を背もたれにかけてください。

椅子全体がスウィングします。



# 電源を入れる

ここでは、電源の入れ方を説明します。

## 1 ご使用前の確認をする (👉7ページ)


## 2 電源プラグをコンセントに差し込む



## 3 背もたれ裏面の主電源スイッチを「入」にする

本体の電源が入り、リモコンの主電源ランプが点灯します。  
(マッサージ待機状態)

※ 前回のマッサージ終了時、もみだまが収納位置(最下位)に戻る前に主電源スイッチを「切」にしたときは、主電源スイッチを「入」にすると、自動的にもみだまが収納位置(最下位)まで移動します。

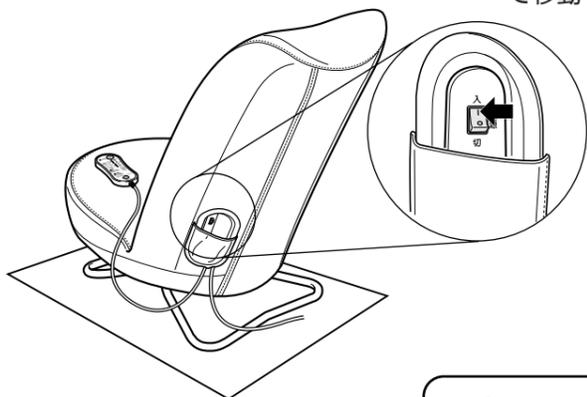

電源を入れたらマッサージの種類を選び、  
マッサージをはじめます

自動コースでマッサージする (👉10ページ)

おこのみでマッサージする (👉11ページ)

# 自動コースでマッサージする

あらかじめ用意された3つの自動コース(上半身、肩、腰)から選びます。  
約12分連続して使用すると、電子タイマーにより自動的に終了します。

マッサージをはじめる前に次のことを確認してください。  
主電源スイッチが「入」になっていますか? (👉9ページ)

## 1 「自動コース」スイッチを押す

スイッチを押すたびに、次のように切り替わります。

(上半身) → (肩) → (腰) → (停止)

ランプが点灯し、マッサージがスタートします。

※ 停止に切り替わったときはランプが消灯し、もみだまはその場所で止まります。

停止状態が約3分続くと、もみだまは自動的に収納位置に戻り、マッサージ待機状態になります。

※ マッサージ中に他のコースに切り替えると、選んだコースの最初からマッサージがスタートします。

※ マッサージ中にもみだまに無理な力が加わると、もみ過ぎ防止のため安全装置が働き、もみだまの動作が止まることがあります。(👉15ページ)

## 2 マッサージを終了する

上半身コースは約11分、肩コースは約6分、腰コースは約5分で終了します。

※ 連続使用約12分で自動的に終了します。

例えば、上半身コースを約8分マッサージしてから、肩コースに切り替えてマッサージをはじめると、肩コースは約4分で終了します。  
(もみだまは自動的に収納位置に移動して終了します。)

・ マッサージを途中でやめたいときは…

「切」スイッチを押します。

(もみだまは自動的に収納位置に移動して終了します。)



## マッサージの内容

- 自動コース
- 上半身 — 肩から腰まで上半身全体をマッサージし、約11分で終了します。
- 肩 — 肩のあたりを効果的にマッサージし、約6分で終了します。
- 腰 — 腰のあたりを効果的にマッサージし、約5分で終了します。

マッサージの詳細内容は自動コースの動作一覧を参照してください。(👉18ページ)

# おこのみでマッサージする

おこのみのマッサージをしたいときに使います。  
 「もみ（上げ、反転、下げ）」「背筋のばし」から選びます。  
 本機は「もみ」と「背筋のばし」を組み合わせることもできます。  
 約12分連続して使用すると、電子タイマーにより自動的に終了します。  
 マッサージをはじめる前に次のことを確認してください。  
 主電源スイッチが「入」になっていますか？（[19ページ](#)）



## 1 おこのみのスイッチを押す

おこのみのマッサージは3種類あります。  
 選んだマッサージのランプが点灯し、マッサージがスタートします。

### 1 「もみ」スイッチ

（上げ、反転、下げ）の動作でコリをソフトにほぐします。  
 「もみ」スイッチを押すたびに、次のように切り替わります。



### 2 「背筋のばし」スイッチ

背筋をのばすようにマッサージし、上半身の緊張をほぐします。  
 ※再度スイッチを押すとランプが消灯し、マッサージが停止します。

### 3 組み合わせマッサージ

「もみ」スイッチと「背筋のばし」スイッチを組み合わせることでマッサージすることができます。

・「もみ」を選んで次に「背筋のばし」スイッチを押したとき

選んだもみ動作（上げ、反転、下げ）をしながら、上半身全体に背筋のばしをおこないます。

・「背筋のばし」を選んで次に「もみ」スイッチを押したとき

背筋のばしをしながら、上半身全体に選んだもみ動作（上げ、反転、下げ）をおこないます。

※停止状態が約3分続くと、もみだまは自動的に収納位置に戻り、マッサージ待機状態になります。

※マッサージ中にもみだまに無理な力が加わると、もみ過ぎ防止のため安全装置が働き、もみだまの動作が止まることがあります。

（[15ページ](#)）




「もみ昇降」スイッチで、もみだまの位置を調節することができます

もみだまを上に移させるときはもみ昇降「上」スイッチを、もみだまを下に移させるときはもみ昇降「下」スイッチを押し続けます。

※「もみ」のマッサージ中に調節することができます。

「もみ速度」スイッチで、「もみ」の速さを変えることができます

スイッチを押すたびに、「もみ」の速さが次のように切り替わります。

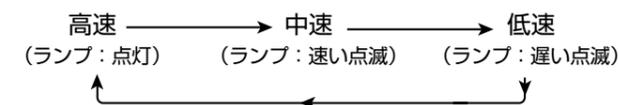

※「もみ」開始時は高速になっています。

※「自動コース」「背筋のばし」の速さを変えることはできません。

## 2 マッサージを終了する

「切」スイッチを押します。  
 （もみだまは自動的に収納位置に移動して終了します。）

※連続使用約12分でマッサージを自動的に終了します。  
 （もみだまは自動的に収納位置に移動して終了します。）

## おこのみのマッサージの種類と動き方 （イラストはイメージです）

### 組み合わせマッサージの種類と動き方

もみ（上げ）	もみ（反転）	もみ（下げ）	背筋のばし	背筋のばし もみ（上げ）	背筋のばし もみ（反転）	背筋のばし もみ（下げ）

# マッサージが終わったら


マッサージが終わったら、主電源スイッチを「切」にし、リモコンはリモコンポケットに収納しておいてください。また、使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

## 1 もみだまが収納位置に戻ったことを確認する

※ マッサージが終了すると、もみだまは背もたれの収納位置（最下位）まで移動しています。


## 2 背もたれ裏面の主電源スイッチを「切」にする

リモコンの主電源ランプが消灯します。

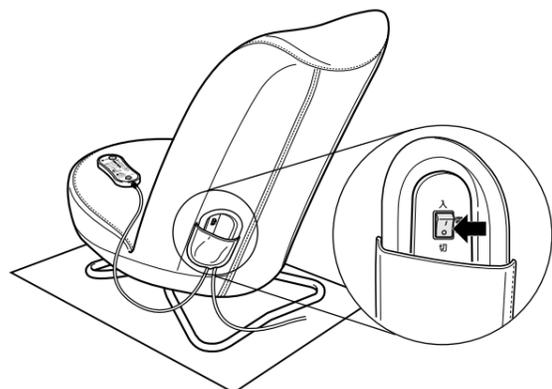


## 3 リモコンを収納する

リモコンをリモコンポケットに収納します。

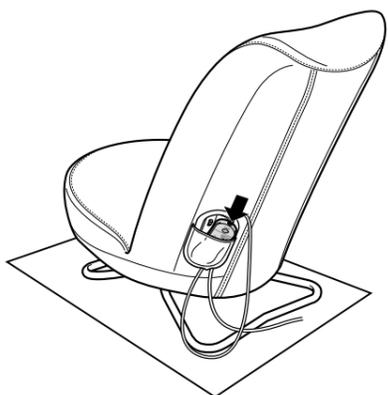

## 4 電源プラグをコンセントから抜く

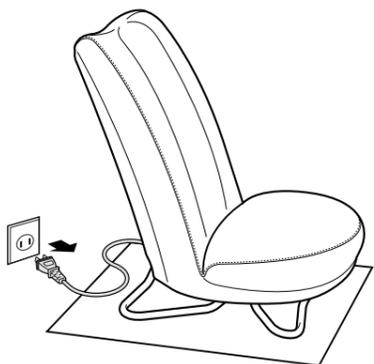

# お手入れと保管

## お手入れのしかた

- いつも清潔にしてお使いください。
- 主電源スイッチを「切」にしてから、電源プラグをコンセントから抜いて、お手入れしてください。
- 本体の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- 汚れがひどいときは、水または中性洗剤をしみこませた布をかたく絞って拭き取り、やわらかい布でから拭きしてください。  
※ 本体内部に水などが入らないようにしてください。
- 入浴剤（特にイオウ成分を含んだもの）やシャンプー、整髪料などが付着したときは、速やかに乾いた布で拭き取ってください。



## リモコンのお手入れについて

- リモコンについた汚れは、乾いた布で拭き取ってください。

## 保管のしかた

次の条件を満たしている環境下で保管してください。


温度：5℃～35℃

湿度：30%RH～85%RH（結露無きこと）

## お手入れと保管の注意

- 汚れを落とすとき、ベンジン、シンナー、ガソリンなどを使用しないでください。
- 次のようなところに保管しないでください。
  - 水のかかるところ。
  - 高温・多湿、直射日光、ホコリ、塩分などを含んだ空気の影響を受けるところ。
  - 傾斜、振動、衝撃のあるところ。
  - 化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところ。

※上記の注意事項、その他の正しい使用方法をお守りいただけない場合は、品質に責任を負いかねます。

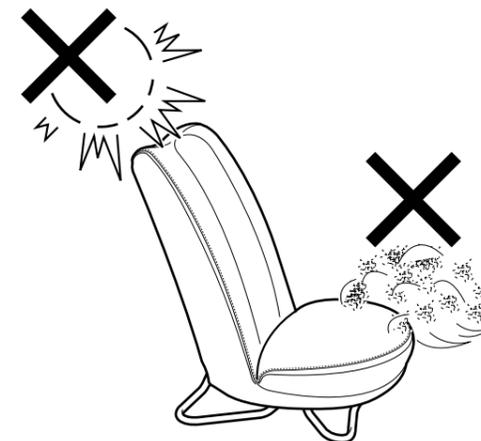

## おかしいな?と思ったら

こんなとき	考えられる原因	直し方
動作しない、または途中から動かなくなった	主電源ランプが点灯している	電子タイマーが働き、マッサージが終了している 再度使用するときは、自動コース、もみ、背筋のばし、いずれかのスイッチを押してください (☞ 10~12ページ)
	主電源ランプが消えている	電源プラグがコンセントから抜けている 電源プラグをコンセントに差し込んでください (☞ 9ページ) 背もたれ裏面の主電源スイッチが「切」になっている 主電源スイッチを「入」にしてください (☞ 9ページ)
	自動コースの3つのランプが点滅している	もみだまに無理な力がかかったため、安全装置が働いて停止しています。一度、主電源スイッチを「切」にし、再度電源を入れ直してから、体を浮かし気味にして使用してください また、電源を入れ直しても動作しない場合は安全装置が働いています。主電源スイッチを「切」にし、1時間以上おいてから使用してください

※リモコンのスイッチが効かない場合は、一度主電源スイッチを「切」にし、少し時間をおいてから再度主電源スイッチを「入」にしてください。

※上記の方法でも直らない場合は、オムロンお客様サービスセンターへ修理の依頼をしてください。(☞ 16ページ)  
なお、その際にご購入商品名称、形式、お買い上げ時期、故障状況などを詳しくお知らせください。

### ■音について

本機をお使いになるときは、モーターの回転音、歯車の回転音、生地のコすれる音、椅子のきしみ音などが発生します。

これらは、構造上やむを得ず発生するもので故障ではありません。また、製品寿命にも影響ありません。

## お問い合わせ先

### 修理を依頼する前に

15ページ「おかしいな?と思ったら」をご確認ください。

それでも直らないときは、下記のオムロンお客様サービスセンターにお問い合わせください。



商品・別売品

修理・商品に関するお問い合わせ  
別売品・消耗部品のお求めは

**オムロンお客様サービスセンター**

むろんオムロン



修理

☎ **0120-30-6606** 通話料無料

FAX **0120-10-1625** 通信料無料

受付時間 9:00~19:00 (祝日を除く月~金)  
(都合によりお休みさせていただくことがあります。)

別売品・消耗部品は、インターネットでもお求めいただけます。

オムロンインターネットパーツセンター

<http://shop.healthcare.omron.co.jp>

24時間受け付けています。(通信料、送料はお客様ご負担となります。)




オムロン健康機器ホームページ「健康プラザ」のご案内

ホームページでは新製品情報や健康に関するさまざまな情報をお届けしています。  
あなたの健康づくりに役立つアドバイスやヒントが満載です。  
別売品や消耗部品もご注文いただける便利なホームページです。  
ぜひ、一度ご覧ください。

<http://www.healthcare.omron.co.jp>

※通信料はお客様ご負担となります。

# 仕様

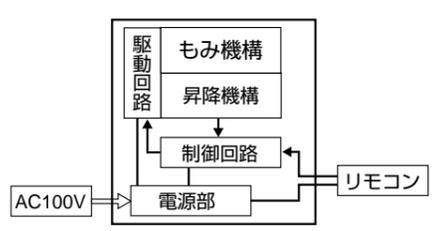医療用具許可番号	34BZ5010
類別	器具器械77 バイブレーター
一般的名称	家庭用電気マッサージ器
使用目的/効能効果	あんま、マッサージの代用 ・疲労回復 ・血行をよくする ・筋肉の疲れをとる ・筋肉のコリをほぐす ・神経痛、筋肉痛の痛みの緩解
商品名称 形式	オムロンマッサージチェア pisu (ピ・イス) HM-411
使用電源	AC100V 50/60Hz
消費電力*	19.5W
定格時間	30分
使用温湿度	5~35℃ 30~85%RH
質量	約25kg
外形寸法	スウィングしていないとき：幅 約600×高さ 約890×奥行き 約925mm 最大スウィングしたとき：幅 約600×高さ 約733×奥行き 約1032mm
スウィング角度	最大約15°
タイマー	約12分
もみだま数	4つ玉
もみだま移動時間*	往復約1分
もみ上下移動距離	約590mm
もみ幅	広い：約140mm、狭い：約60mm
もみ速度*	3段階（高速：約25回転/分・中速：約20回転/分・低速：約14回転/分）
マッサージメニュー	【自動コース】上半身コース（約11分）、肩コース（約6分）、腰コース（約5分） 【おこのみ】もみ（上げ、反転、下げ）、背筋のばし もみ（上げ）+背筋のばし、もみ（反転）+背筋のばし、もみ（下げ）+背筋のばし
動作原理	もみ機構、昇降機構それぞれにモータを内蔵。リモコンからの動作モード指示情報にもとづき、制御回路が各機構の駆動回路を動作させ、各モータを駆動することにより指定されたマッサージ動作をさせる 
付属品	取扱説明書、品質保証書
製造元	デルタ工業株式会社 広島県安芸郡府中町新地1番14号
お問い合わせ先	オムロンヘルスケア株式会社 住所：〒615-0084 京都府京都市右京区山ノ内山ノ下町24 電話：0120-30-6606（オムロンお客様サービスセンター）


\*23℃の環境にてAC100V無負荷で動作させたときの値です。（使用条件により異なります）

お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

# 自動コース動作一覧


## 上半身コース

マッサージ時間約11分

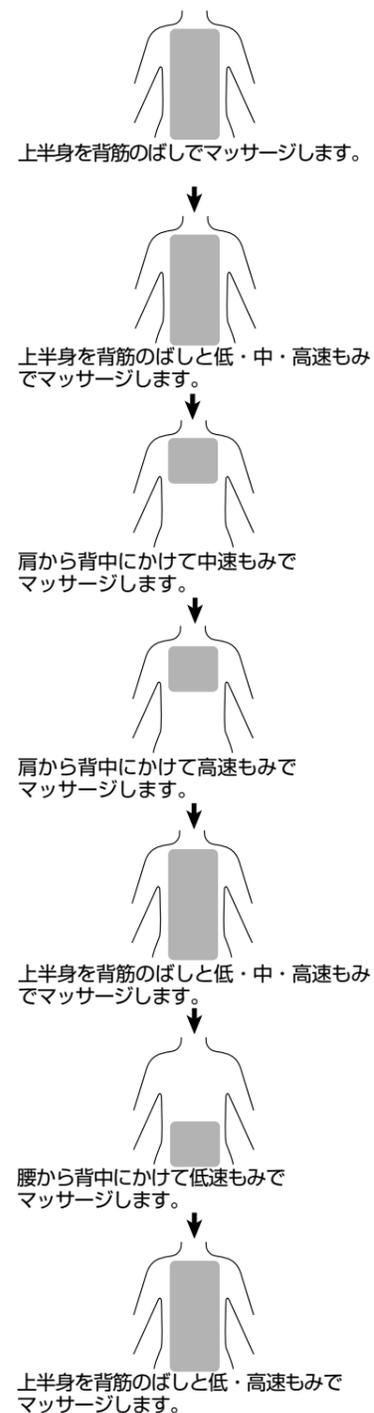


## 肩コース

マッサージ時間約6分

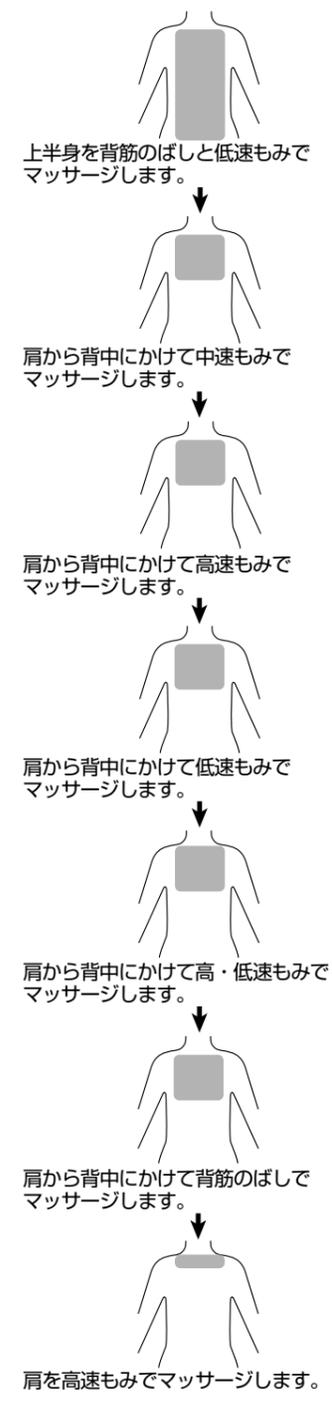

## 腰コース

マッサージ時間約5分

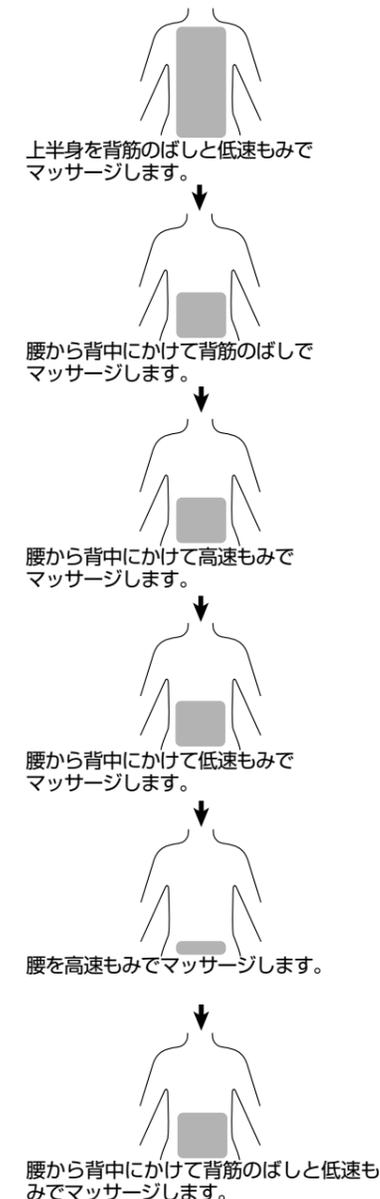

※この動作一覧図はマッサージ動作をわかりやすくするために、本来の動作を省略してあります。