


取扱説明書 [保証書付き]

オムロン電子体温計
MC-142L 口中用

医療機器認証番号:218AGBZX00005000

- このたびは、オムロン商品をお買い上げいただきましてありがとうございました。
- 安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
- 本書は、いつもお手元においてご使用ください。
- 本書は品質保証書を兼ねています。紛失しないように保管してください。

けんあんくん

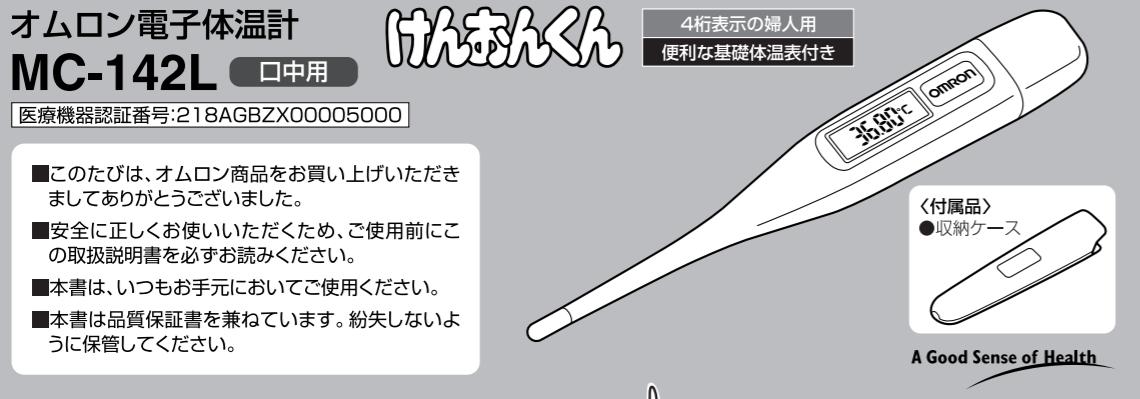

安全上のご注意

お使いになる前に、よくお読みください。
ここに示した警告サインと図記号の例は、商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。(表示と意味は次のようにになっています。)

■警告サインの内容について

⚠ 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠ 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害※の発生が想定される内容を示します。
※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。	
■図記号の例	

■図記号の例

!	記号は強制(必ず守ること)	記号は禁止(してはいけないこと)	△記号は注意(警告・危険を含む)
⚠ 警告			
検温結果の自己診断や治療は危険です。 医師の指導に従ってください。 自己診断は、病気が悪化する恐れがあります。			
本製品は口中用の体温計です。 それ以外(わきや耳など)で検温しないでください。 正しい検温ができません。耳などを傷つける恐れがあります。			
乳幼児の手の届かないところに保管してください。 また、お子様だけでのご使用はさせてください。 自分で無理に測ろうとしてしまう恐れがあります。			
本体が水などでぬれた状態で測定しないでください。 正しい検温ができません。			

⚠ 注意

本体は、防水ではありません。
本体内部に、水などが入らないようにしてください。
検温時に誤差が生じたり、故障の原因になります。

分解や修理、改造をしないでください。
検温時に誤差が生じたり、故障の原因になります。

本体を嗜まないでください。
事故や故障の原因になります。

電池・ネジは、乳幼児の手の届かないところに置いてください。
乳幼児が飲み込む恐れがあります。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

万一、電池の液が目に入ったときは、すぐに多量のきれいな水で洗い流してください。
失明など、障害の恐れがあります。必ず、医師の治療を受けてください。

万一、電池の液が皮膚や衣服に付着した場合は、すぐに多量のきれいな水で洗い流してください。
けがなどの恐れがあります。

電池を火の中に投げ込まないでください。
電池が破裂する恐れがあります。

電池は、+(-)を間違えないように交換してください。
漏液、発熱、破裂などを起こし、本体を破損させる恐れがあります。

強い静電気や電磁波のある場所で使用しないでください。
検温時に誤差が生じたり、故障の原因になります。

複数の人で併用しないでください。
病原菌の感染する原因になります。

OMRON
1649816-0A

体温の測りかた(検温)

1




表示部が全点灯

188.88 °C

検温の準備中

37.00 °C

2

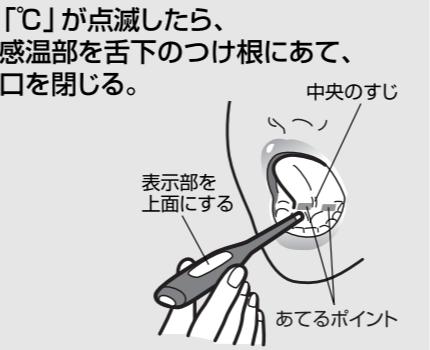


「°C」が点滅すれば
準備完了

点滅

検温スタート

点滅

3

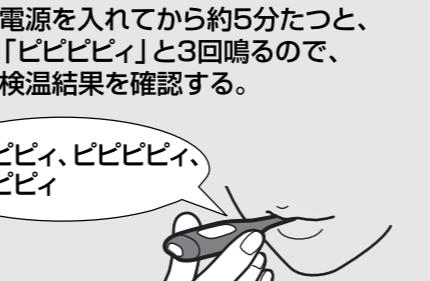


「°C」が点灯に変わる

点灯

36.80 °C

4

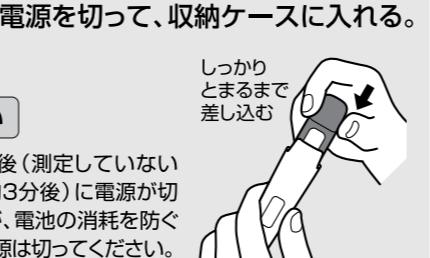

お願い

約30分後(測定していないときは約3分後)に電源が切れますが、電池の消耗を防ぐため、電源は切ってください。

故障かな?と思ったら…

■検温値がばらつく。

ここを確認する	処置のしかた
● 感温部をあてるところが検温するたびに変わっています。	「体温計の正しいあてかた」、「基礎体温を正しく測るために」を確認してください。
● 検温中に体温計が動いてしませんでしたか。	● 下記の事を守ってください。故障の原因になります。 ・汚れを落とすときは、ベンジン、シンナーなどを使用しないでください。
● 検温中に口を開けませんでしたか。	・本体は、防水ではありません。本体内部に、水などが入らないように注意してください。

■思ったより検温値が高いと思ったとき。

ここを確認する	処置のしかた
外気温が32°Cを越えていますか?	感温部をよくしぼったぬれタオルなどで冷やしても一度測りなおしてください。

■電源スイッチを押しても表示部に何も表示されない。

ここを確認する	処置のしかた
電池の+(-)の向きが間違っていますか?	電池を正しく入れ直してください。
● 電池が消耗していませんか。 ● 表示部に「□」が表示されていますか?	新しい電池(LR41)と交換してください。

■検温準備中に「37.00°C」が出ない。

ここを確認する	処置のしかた
「36.95°C」～「37.05°C」が表示されています。	そのままご使用いただけます。
電源を入れなおしても何度も「36.95°C」～「37.05°C」以外が表示されます。	故障の可能性があります。 オムロンお客様サービスセンターへお問い合わせください。

■検温値以外が表示されたとき。

表示	表示の原因	処置のしかた
L	感温部の温度32°C未満のときに表示されます。	エラーではありません。そのまま検温を続けてください。
H	感温部の温度が42°Cを超えるときに表示されます。	感温部を、よくしぼったぬれタオルなどで冷やしても一度測りなおしてください。

未永くご使用いただくためのお願い

故障の原因となりますので、下記の注意をお守りください。

- 人の検温以外には使用しないでください。
- 本体や収納ケースに強いショックを与えた後、落としたり、踏んだり、振動を与えたりしないでください。
- 水気が付いたまままでケース内に収納しないでください。必ず、乾いた布でふき取ってください。

仕様

医療機器認証番号	218AGBZX00005000	体温表示	4行+°C表示、0.01°C毎
類別	機械器具 16体温計	測定精度	±0.05°C(35.00～38.00°C)、±0.1°C(32.00～34.99°C)および38.01～42.00°C ※標準室温23°Cにて恒温水槽で実測測定した場合
一般的な称	電子体温計	測定範囲	32.00～42.00°C
医療機器分類	管理医療機器	使用環境	周囲温度:-20～+60°C、相対湿度:30～95%RH
販売名	オムロン電子体温計 MC-142L	保管環境	周囲温度:-20～+60°C、相対湿度:30～95%RH
電源電圧	DC 1.5V (アルカリマンガンボタン電池LR41×1個)	本体質量	約11g (電池含む)
消費電力	約0.1mW	外形寸法	幅18.4×長さ130×厚さ11.3mm
電池寿命	約1100回 (実測:5分)	付属品	●お試し用電池 (アルカリマンガンボタン電池 LR41×1個) ●収納ケース ●取扱説明書 (基礎体温表・品質保証書付き)
感温部	サーミスタ	測定方式	実測

EMC適合 本商品はEMC規格 IEC 60601-1-2:2001に適合しています。

オムロン健康商品・修理・別売品・消耗品に関するお問い合わせは
オムロンお客様サービスセンター ☎ 0120-30-6606 (料金無料)
ダイヤルは正確に
受付時間 9:00～19:00月～金 (祝日を除く)

ホームページ <http://www.healthcare.omron.co.jp/>

*通話料はお客様ご負担となります。(別売品・消耗品は、インターネットでもお求めいただけます。)

製造販売元 オムロンヘルスケア株式会社

〒615-0084 京都府京都市右京区山ノ内山下町24番地

使い終わったら

体温計は、いつも清潔にお手入れしてください。

- 本体の汚れは、乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- 汚れがひどいときは、水または中性洗剤をしみこませた布をかたく絞って拭き取った後、やわらかい布でから拭いてください。
- 下記の事を守ってください。故障の原因になります。
・汚れを落とすときは、ベンジン、シンナーなどを使用しないでください。
- ・本体は、防水ではありません。本体内部に、水などが入らないように注意してください。
- ・体温計を水、長時間アルコールに浸したり、熱湯(50°Cを超える湯)で消毒しないでください。
- ・超音波洗浄をしないでください。



電池の交換のしかた

使用電池：アルカリマンガンボタン電池LR41 (市販品)

電池交換表示

電源を入れたときに、表示部右側の表示が出たら、電池を交換してください。



交換のしかた

1 本体裏面の電池カバーのネジを外して、取り外す。



3 電池を(+を上にして)、図のように入れる。



2 細くて折れにくい棒で、電池を取り外す。



